

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**Материал- геля для внутрикожной имплантации**

Москва 2007

## **VISCODERM**

(Hyaluronic acid sodium salt)

Стерильный медицинский продукт для интрадермального введения

0.8% - 8мг / 1мл гиалуроната натрия

1.6% - 16мг / 1мл гиалуроната натрия

2.0% - 20мг / 1мл гиалуроната натрия

### **СОСТАВ**

VISCODERM 0.8%

Действующее вещество: гиалуроновая кислота в форме гиалуроната натрия в концентрации 8мг / 1мл.

Вспомогательные вещества: хлорид натрия, фосфат натрия, дистиллированная вода.

VISCODERM 1.6%

Действующее вещество: гиалуроновая кислота в форме гиалуроната натрия в концентрации 16мг / 1мл.

Вспомогательные вещества: хлорид натрия, фосфат натрия, дистиллированная вода.

VISCODERM 2.0%

Действующее вещество: гиалуроновая кислота в форме гиалуроната натрия в концентрации 20мг / 1мл.

Вспомогательные вещества: хлорид натрия, фосфат натрия, дистиллированная вода.

### **ОПИСАНИЕ**

VISCODERM бесцветный, прозрачный, вязкий гель гиалуроновой кислоты в форме высокоочищенного гиалуроната натрия с молекулярным весом около 1000 КДа.

Гиалуроновая кислота, используемая в VISCODERM получена биотехнологическим путем и не подвергалась химической модификации, а также имеет молекулярный вес, максимально приближенный к молекулярному весу эндогенной гиалуроновой кислоты, что обеспечивает максимальную биосовместимость с тканями и хорошую переносимость препарата.

### **ДЕЙСТВИЕ**

Гиалуроновая кислота это полисахарид, который химически, физиологически и биологически идентичен для человека и является важнейшим компонентом внеклеточного матрикса большинства тканей, включая кожу.

Основная функция ГК - поддержание необходимой увлажненности тканей, благодаря уникальным влагоудерживающим свойствам, а также создание оптимальных физиологических условий для пролиферации и синтетической активности фибробластов, что приводит к естественному обновлению дермы. Активизация процессов регенерации и увеличение объема дермы при введении VISCODERM предупреждает появление морщин, позволяет устранять мелкие и корректировать глубокие морщины, а также атрофические рубцы кожи. Интрадермальное введение VISCODERM оказывает иммуномодулирующее и антиоксидантное действие, обеспечивая защиту тканей при проведении эстетических манипуляций.

## **ПОКАЗАНИЯ**

- Кожа с признаками старения
- Фотостарение, солнечный эластоз кожи лица, шеи, области декольте, тыльной поверхности кистей рук
- Дегидратированная кожа
- Восстановление кожи, поврежденной вследствие токсических воздействий, курения, приема лекарственных препаратов
- Подготовка и реабилитация при проведении эстетических манипуляций (химических пилингов, дермабразии, лазерной шлифовки кожи)

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ У нас шире, беременность....**

- Viscoderm нельзя использовать одновременно с лазерными процедурами, срединным и глубоким пилингами

## **РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КУРСЫ**

Выбор курса лечения проводится по назначению врача.

Основной курс лечения состоит из трех процедур с интервалом 1 неделя.

Для поддержания достигнутого эффекта рекомендованы ежемесячные поддерживающие процедуры.

VISCODERM 0.8%: рекомендуется для дегидратированной кожи, а также при начальных признаках старения и на участках с тонкой, деликатной кожей (периорбитальная зона).

VISCODERM 1.6%: рекомендуется для кожи с умеренными признаками старения, у лиц с тонкой и чувствительной кожей.

VISCODERM 2.0%: рекомендуется для кожи с выраженными признаками старения, обеспечивает кратковременный филлерный эффект.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Соберите шприц, как показано в настоящей инструкции.

Введение препарата VISCODERM должно осуществляться при комнатной температуре с соблюдением правил асептики и антисептики.

VISCODERM вводится интрадермально с применением техник: микропапулы, линейная, «сетка», «веер».

Рекомендуется использовать иглы диаметром 27 или 30 G длиной 13,0 мм.

Возможно применение на любых участках лица и тела.

Исходя из индивидуальной чувствительности пациента к болевым ощущениям возможна аппликационная анестезия кожи.

## **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Соблюдение четких правил техники введения позволяет избежать осложнений.

При введении VISCODERM, как и при любой интрадермальной инъекции, в зоне коррекции возможно покраснение, отек, незначительная болезненность. Эти симптомы проходят самостоятельно в течение короткого времени и не требуют дополнительного лечения. Охлаждение места инъекции после процедуры позволяет уменьшить выраженность данных проявлений.

## **ОПИСАНИЕ СБОРКИ ШПРИЦА**

1. Вставьте держатель до упора
2. Снимите защитный колпачок со шприца, как показано на рис.А
3. Наденьте и зафиксируйте иглу, как показано на рис. Б
4. Аккуратно снимите крышку с иглы, избегая контакта с канюлей

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**

Взаимодействие VISCODERM с другими препаратами не изучалось.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

- Не используйте препарат по истечении срока годности
- Не используйте препарат при нарушении целостности внутренней упаковки
- Препарат вводится только интрадермально, избегайте попадания в кровеносные сосуды, а также внутримышечного введения препарата
- Не смешивать с другими препаратами
- Не вводить в области с проявлениями воспалительных явлений
- После вскрытия упаковки препарат должен быть немедленно использован и утилизирован.!
- Не стерилизовать повторно! Одноразовый продукт
- Повторное использование шприца не допустимо
- Не используйте для дезинфекции кожи препараты, содержащие четвертичные соли аммония, что может привести к осаждению ГК
- В течении 3-5 дней после инъекций пациентам рекомендуется избегать активной инсоляции и использовать солнцезащитные крема с максимальным UV-фактором
- Хранить в недоступном для детей месте

## **ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА**

В стерильной упаковке содержится 1 стеклянный градуированный шприц, объемом 1.25 мл, содержащий 1.0 мл 0.8%, 1.6%, 2.0% раствора гиалуроновой кислоты в форме гиалуроната натрия, пластиковый упор. Содержимое шприца стерильно и апиrogenно.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Препарат необходимо хранить при 0-25° С. Не замораживать.

Срок хранения  
36 месяцев

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
Gelfipharma International Srl  
Via Emilia 99/A

26900 LODY – S. Grato, Italy

ДИСТРИБЬЮТОР  
IBSA Farmaceutici, Italy Sr  
Via Emilia 99  
26900 LODI – S.Grato

ДИСТРИБЬЮТОР  
ООО «Маруга »  
117630, Москва  
Старокалужское шоссе, 62 /1