



ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА УХОДА ЗА КОЖЕЙ «ЛИЦО БЕЗ ФИЛЬТРОВ». КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ

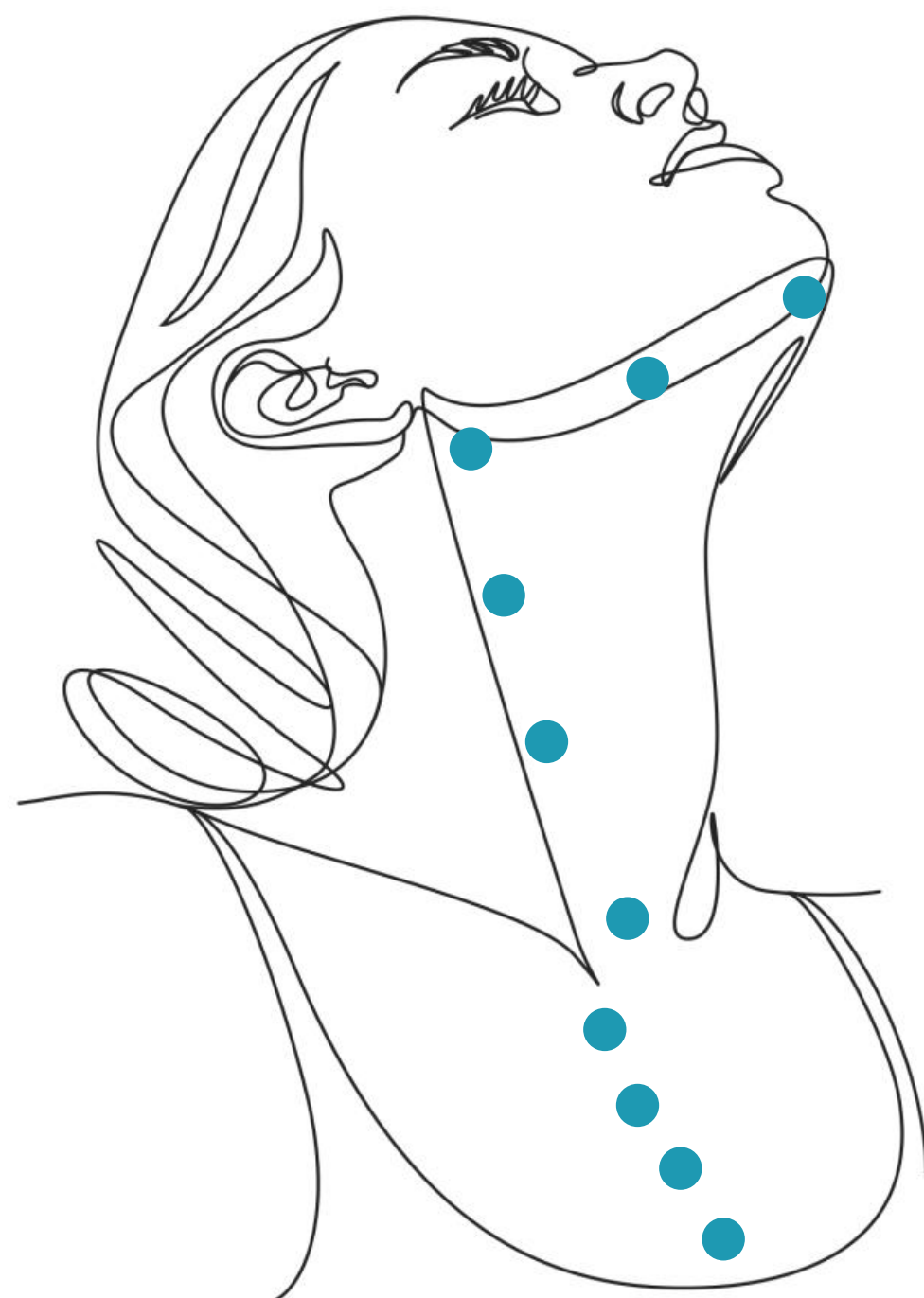

+

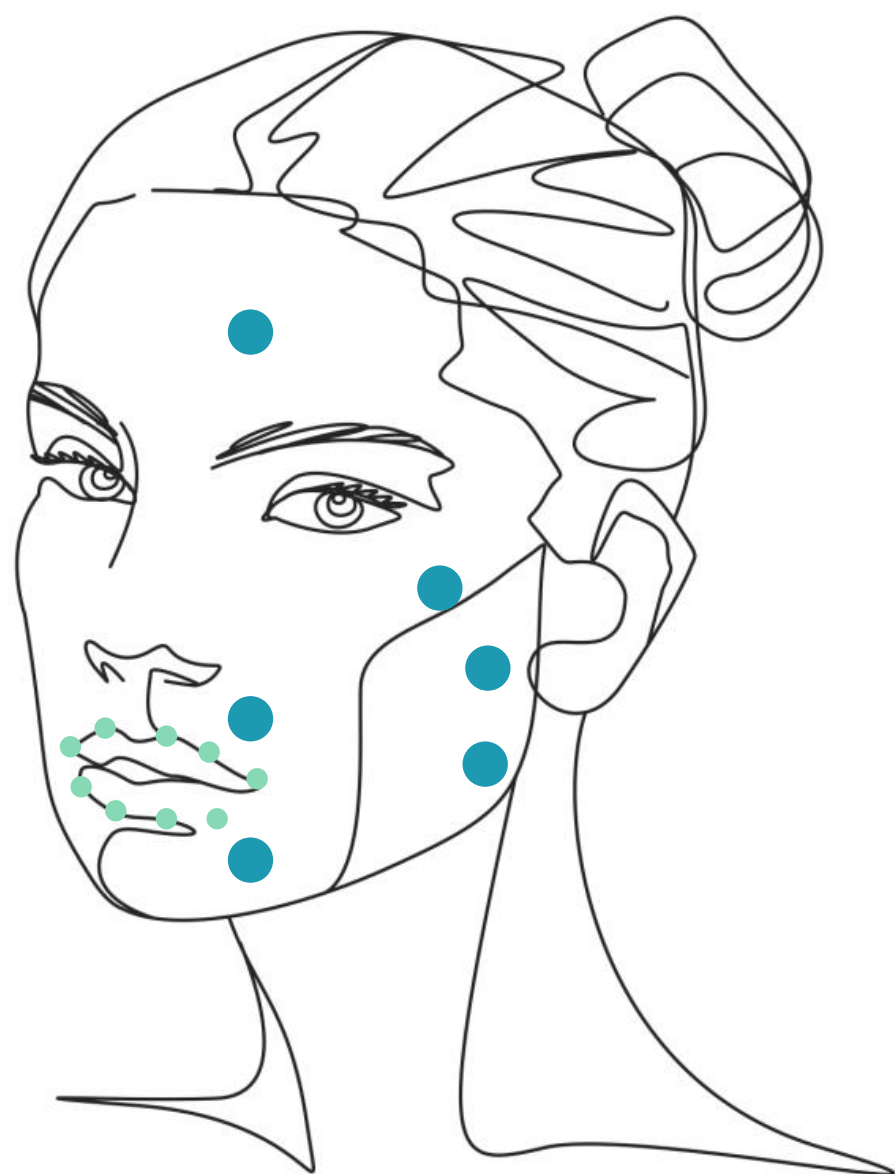

+



Шаг 1.


Подготовка кожи: очистить кожу с помощью очищающей пенки «Cleansing Foam DSA», обработать кожу водным раствором антисептика.

Шаг 2.

Нанести наружное анестезирующее средство.




ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА УХОДА ЗА КОЖЕЙ «ЛИЦО БЕЗ ФИЛЬТРОВ». КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ

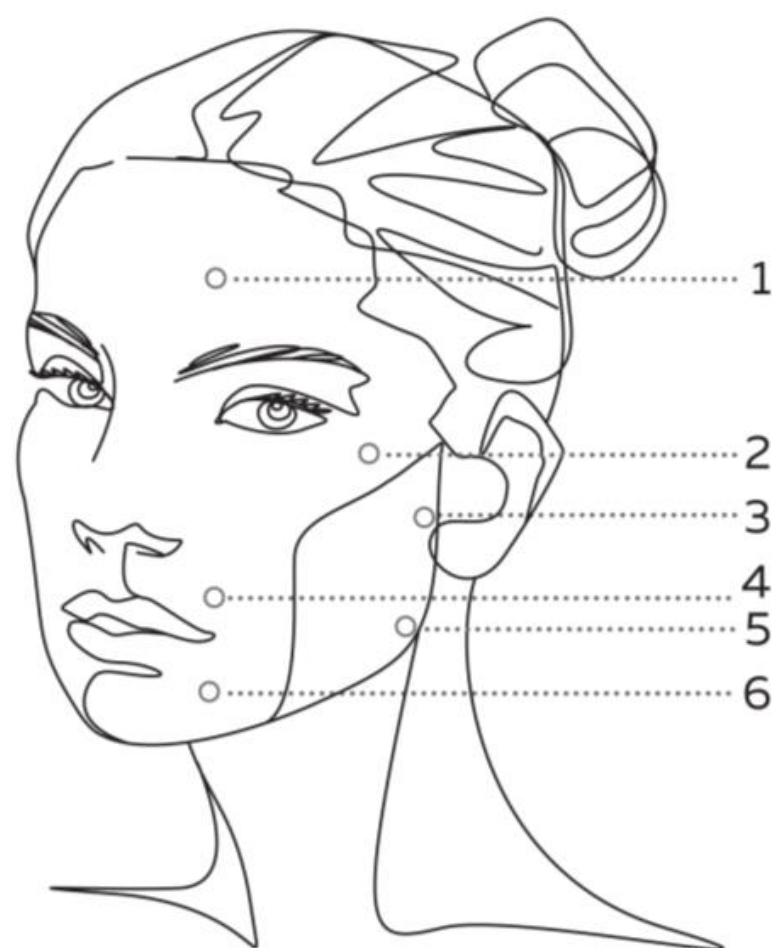

Лицо:

Точки 1 и 6 - 0,1 мл препарата
Точки 2, 3, 4, 5 - 0,2 мл препарата

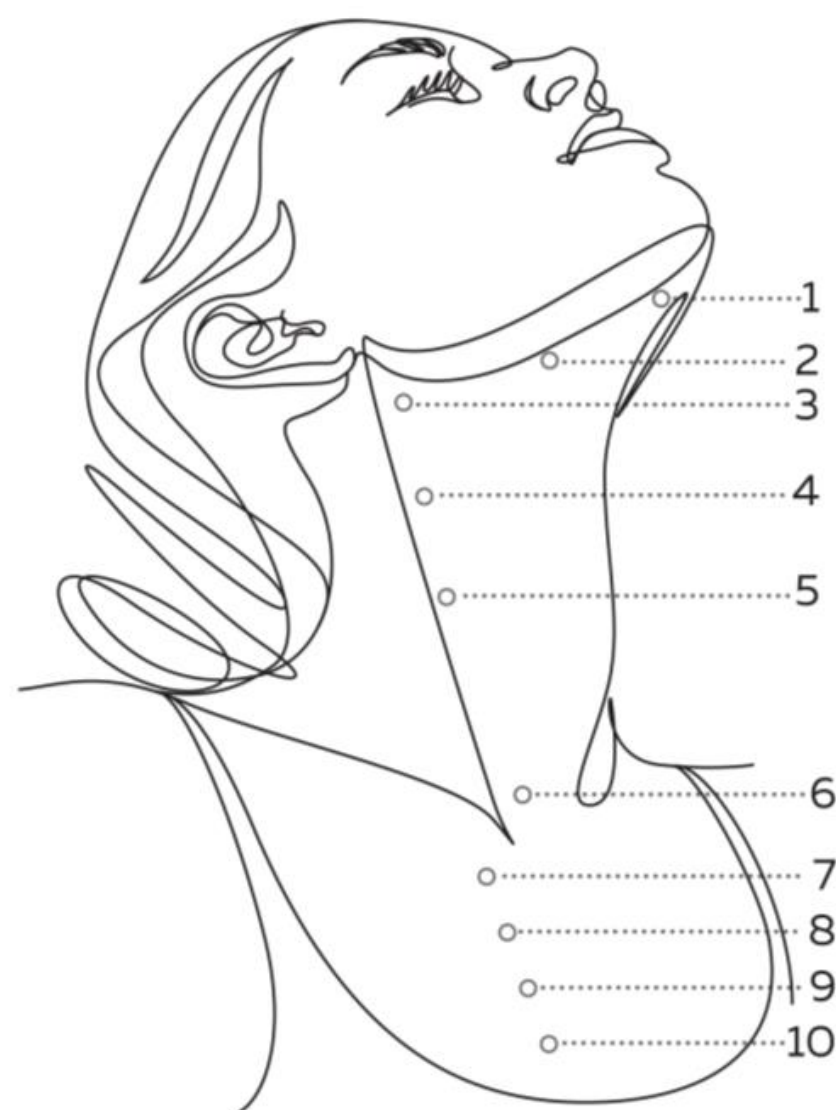

Шея и декольте:

Точки 1 - 10 по 0,1 мл препарата



Шаг 3.

Провести инъекции Repart PG по биоэстетическим точкам.



Шаг 4.

Провести инъекции Repart 6 по точкам в периорбитальной области и микропапульно «точка за точкой» по контуру губ.

Периорбитальная область:

Техника: микроболюсно
Объем: 0,05 0,1 мл
1 у внутреннего угла глаза
2 на линии, проведенной от внешнего угла глаза по костному краю орбиты
3 на 1,5 2 см от внешнего угла глаза

Область вокруг губ:

По белому валику губ
Микропапульно
«точка за точкой»
Игла 32 33 G
Объем 0,5 1,0 мл



ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА УХОДА ЗА КОЖЕЙ «ЛИЦО БЕЗ ФИЛЬТРОВ». КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ

Шаг 5.

Выполнить химический пилинг DeepSkinArt в количестве 1 - 2 слоев, аккуратно впитывая каждый слой до прекращения скольжения.

Шаг 6.

Удалить остатки пилинга салфетками, обильно смоченными в водном растворе антисептика.



Шаг 7.

Нанести кислородную гель-маску «Oxygen gel mask DSA» тонким слоем на 15-20 минут. Остатки маски впитать в кожу.

Шаг 8.

Нанести защитный крем.

