



Aliaxin®

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИГЛЫ.


КОМПАНИЯ IBSA ВСЕГДА ИЩЕТ НОВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ С ИНЪЕКЦИОННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. ПОЭТОМУ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ **ШПРИЦЫ С НОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ LUERLOCK BD HYLOCK™** И **ИГЛУ TSK HPS**, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ВНЕЗАПНОГО СРЫВА ИГЛЫ.

Новое крепление BD Hylock™


Новый дизайн
наконечника

Новый дизайн
адаптера luerlock

КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

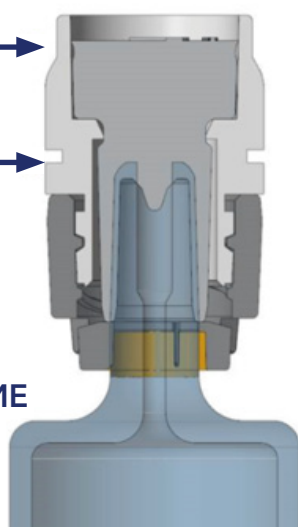

Новый шприц оснащен новой системой **luerlock BD Hylock™**. Из-за особой формы иглу необходимо ввинтить полностью. У врача может возникнуть ощущение, что игла ввинчена полностью, но необходимо повернуть иглу еще раз. Это позволит избежать возможных проблем.

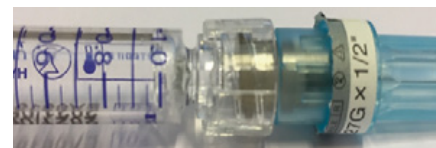


КАНЮЛЯ ИГЛЫ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЖЕСТКОГО ПОЛИМЕРА.

Благодаря более широкой внутренней полости, повышается скорость введения препарата. Новая канюля короче, чем канюля традиционной иглы. Внешняя резьба обеспечивает более плотное соединение с адаптером.

Усовершенствованная
конструкция и меньшая
длина канюли

Повышенная скорость
введения препарата

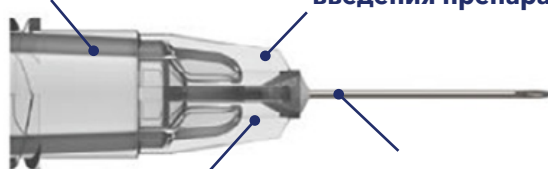

Не гнется

Защита от срыва иглы

Если игла ввинчена не полностью, существует вероятность, что препарат будет вытекать из задней части крепления **luerlock**.

Кроме того, неправильная установка иглы затрудняет выдавливание препарата, и если при этом врач попытается сильнее надавить на поршень, шприц может сломаться.

Просим Вас внимательно относиться к установке иглы, каждый препарат имеет свою особенность и тонкости работы.

Для более подробной инструкции связывайтесь с ответственными менеджерами компании «Маруга» по телефону: **+7 (495) 777 67 07**