


ТЕХНИКА ИНЪЕКЦИЙ

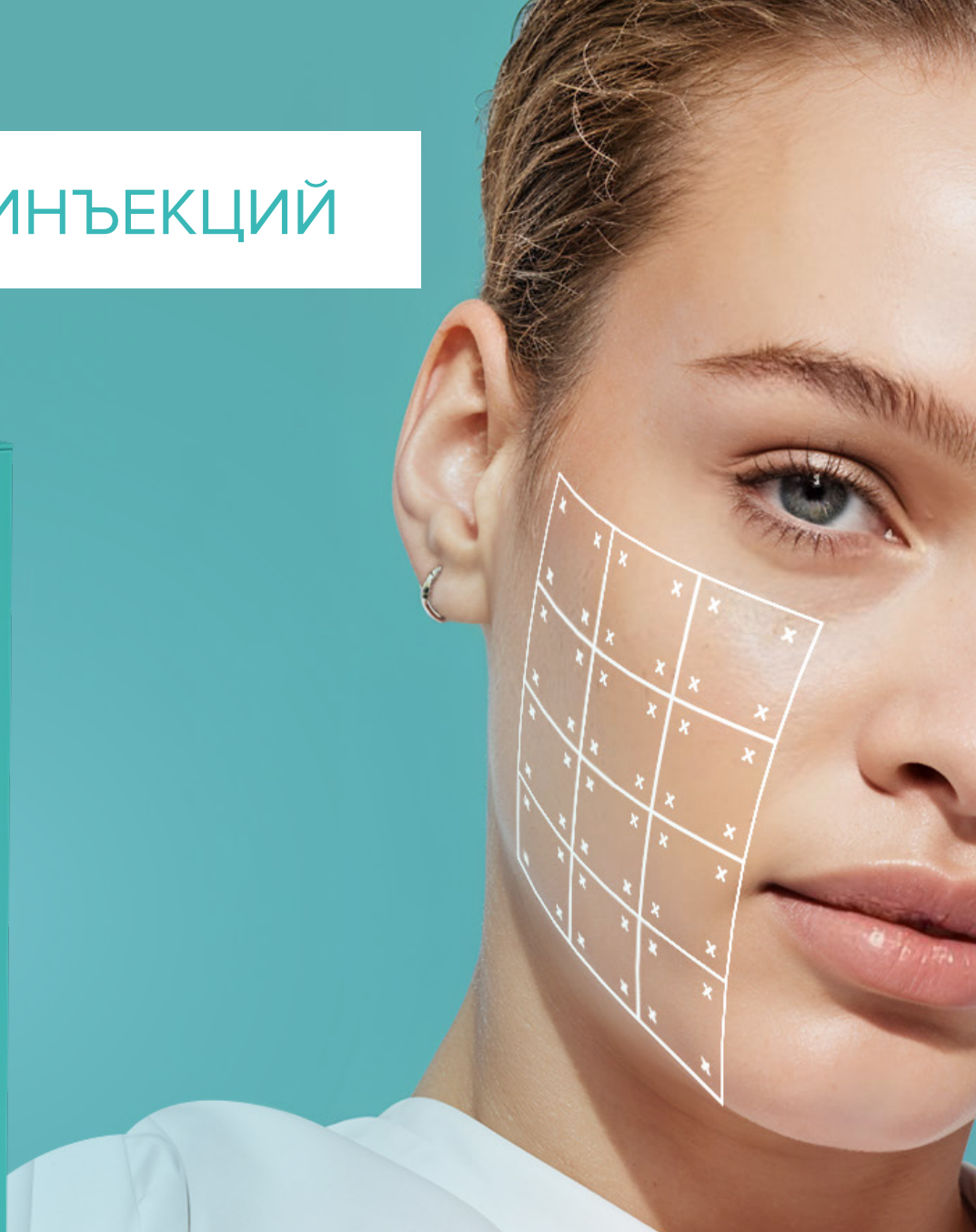

ПЕРВЫЙ
СКИНВАЙВЕР


В КОЛЛЕКЦИИ MERZ AESTHETICS®

BELOTERO® REVIVE

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ*


До процедуры	Крем с анестетиком (за 40 минут до коррекции).
Размер иглы	30–32G
Зона коррекции	Область сегментов S2 и S3 средней и нижней трети лица поделите на квадраты размером 15 мм X 15 мм.
Инъекция	Используя мультипунктурную технику, выполните 4 инъекции филлера Belotero® Revive объемом 0,01–0,02 мл в каждом квадрате. Общее количество препарата на сторону - 1 мл.
Глубина	Средний и глубокий слой дермы.
После процедуры	После завершения инъекций выполните легкий массаж лица.
Периодичность	Курс из 3 процедур с интервалом в 4 недели. Через 6-9 месяцев рекомендован осмотр для оценки необходимости дополнительной процедуры.

BELOTERO® REVIVE

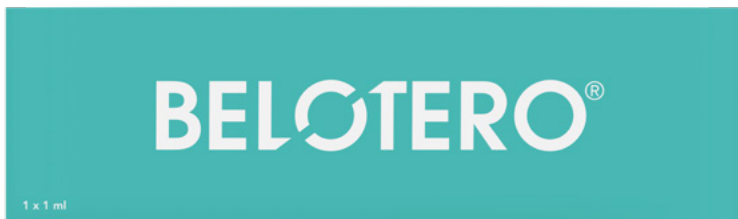

ПЕРЕКРЕСТНО-СВЯЗАННАЯ ГК-КПМ
ГЛИЦЕРИН

20 МГ/МЛ
17,5 МГ/МЛ

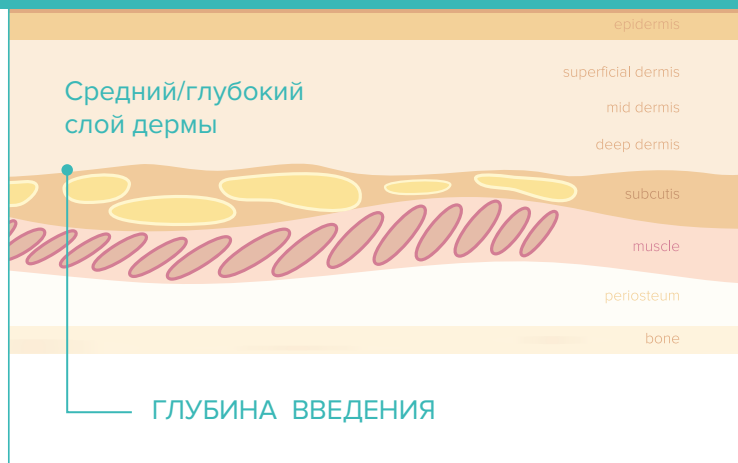

до
36
недель

Улучшение
гидратации кожи*

к
9-12
неделе

Повышение
эластичности
кожи*

у
100%
пациентов

Отмечено эстетическое
улучшение до 12 недель*

до
28
недель

Улучшение
рельефа кожи*

к
16
неделе

Повышение
упругости
и плотности кожи*

до
36
недель

Уменьшение
покраснений
и неровности кожи*



Продемонстрировал эффективность
при работе с фотоповреждениями*



Отмечалась высокая удовлетворенность
пациентов процедурой и результатами коррекции*

МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ
НАБ., 10, БЛОК С «БАШНЯ
НА НАБЕРЕЖНОЙ»

Р О С С И Я
1 2 3 1 1 2

ТЕЛ.: +7 (495) 653 8 555
ООО «МЕРЦ ФАРМА»

*Информация предназначена только для специалистов здравоохранения.

de Wit A, Siebenga PS, Wijdeveld RW, Koopmans PC, van Loghem JAJ. A split-face comparative performance evaluation of injectable hyaluronic acid-based preparations HCC and CPM-HA20G in healthy females. J Cosmet Dermatol. 2022 Nov;21(11):5576-5583. doi: 10.1111/jocd.15157.

Kerscher M, Prager W, Fischer TC, Gauglitz GG, Pavićić T, Kühne U, Kravtsov M, Hofmann M, Dersch H, Sattler S. Facial Skin Revitalization with Cohesive Polydensified Matrix-HA20G: Results from a Randomized Multicenter Clinical Study. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021 Dec 3;9(12):e3973. doi: 10.1097/GOX.0000000000003973.

Kleine-Börger L, Kerscher M. Microinjections with hyaluronic acid in combination with glycerol: How do they influence biophysical viscoelastic skin properties? Skin Res Technol. 2022;28:633–642. DOI: 10.1111/srt.13167.