

NEAUVIATM

ORGANIC



ПРОТОКОЛЫ ПО КОНТУРНОЙ КОРРЕКЦИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИПЛОМИРОВАННЫМИ ВРАЧАМИ

NEAUVIATM

ORGANIC

NEAUVIA ORGANIC - эксперт в области медицинской эстетики, уделяющий особое внимание омолаживающим процедурам. При создании своей продукции мы используем передовые технологии и предлагаем широкий выбор безопасных и эффективных препаратов для процедур омоложения и гармонизации лица, в том числе специально разработанных для комбинированных методов.

- 4/ Старение лица. Каскадный эффект
- 6/ Фокус на ПЭГ-филлеры
- 7/ Описание препаратов NEAUVIA ORGANIC
 - 7/ Показания
 - 7/ Противопоказания
 - 7/ Условия применения
 - 8/ Процедура применения
- 9/ Опасные зоны
- 10/ Эстетические пропорции
- 11/ Техники введения
- 12/ Филлеры NEAUVIA ORGANIC
 - 12/ FLUX, RHEOLOGY
 - 13/ LIPS, LV
 - 14/ INTENSE, INTENSE MAN
 - 15/ STIMULATE, STIMULATE MAN
- 16/ Биоревитализанты NEAUVIA ORGANIC
 - 16/ HYDRO DELUXE
- 17/ Рекомендуемые препараты по морфотипу старения
 - 17/ Мелкоморщинистый морфотип
 - 19/ Деформационный морфотип
 - 20/ Деформационно-отечный морфотип
 - 21/ Усталый морфотип
- 22/ Биоревитализация HYDRO DELUXE
 - 22/ Лицо
 - 22/ Периорбитальная область
 - 22/ Лицо и шея
 - 23/ Шея и декольте
 - 23/ Кисти рук
- 24/ Рекомендуемые препараты по зонам
 - 24/ Контурная пластика губ
 - 26/ Шея и декольте
 - 26/ Кисти рук
- 27/ Сочетанные процедуры коррекции
 - 27/ Stimulate & Lift STIMULATE+HYDRO DELUXE
 - 28/ Лифтинг-эффект INTENSE+HYDRO DELUXE
 - 29/ Гладкая шея FLUX+HYDRO DELUXE
 - 29/ Свежий взгляд RHEOLOGY+HYDRO DELUXE
 - 30/ Идеальный лоб FLUX+HYDRO DELUXE
 - 30/ Лайт FLUX
 - 30/ Медиум RHEOLOGY
 - 31/ Комплекс INTENSE+STIMULATE+LIPS
 - 31/ Комплекс + INTENSE+STIMULATE+LIPS+HYDRO DELUXE



СТАРЕНИЕ ЛИЦА

NEAUVIA[™]
ORGANIC

КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ



ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИЦЕВОМ СКЕЛЕТЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЛИЦА

КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИЦЕВОМ СКЕЛЕТЕ




Резорбция костной ткани

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЛИЦА



Модификация опорных элементов

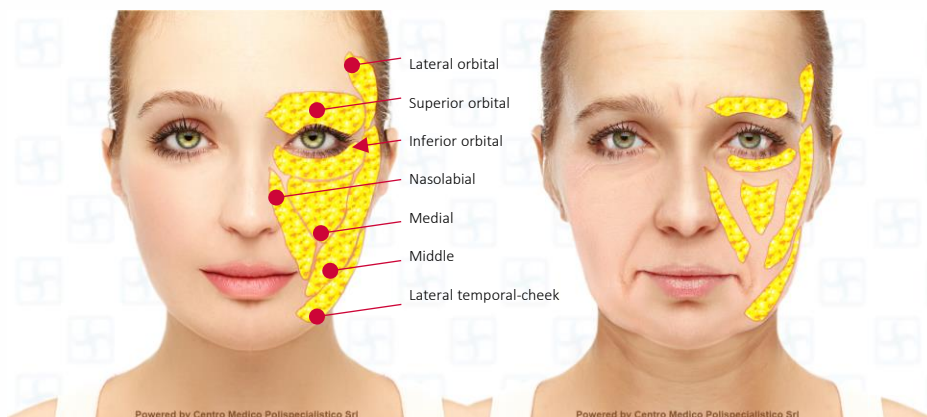

Атрофия и гипертрофия жировой ткани
Дряблость и опущение подкожной клетчатки

ПЭГ – полиэтиленгликоль, используется при сшивании молекул гиалуроновой кислоты в филлерах NEAUVIA ORGANIC

ПЭГ В КОМБИНАЦИИ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ СОЗДАЕТ УНИКАЛЬНУЮ МАТРИЦУ ГИДРОГЕЛЯ

- Имитация собственных тканей
- Защита ГК от быстрой деградации
- Уникальная когезивность и пластичность геля
- Отсутствие иммунного ответа



Долговременный эффект



Превосходные эстетические результаты



Исключён риск образования гранулёмы



Минимальный риск развития отёка



Естественный результат



Стабильный и улучшенный эффект при сочетанных процедурах



Высочайший профиль безопасности

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ филлеров NEAUVIA ORGANIC

Результаты исследования указывают на то, что термостойкость гиалуроновых филлеров зависит от сшивающего агента, поэтому выбор дермальных филлеров имеет решающее значение в случае использования IR, RF, HiFU (или любого другого устройства, излучающего тепло) поверх ранее введенного филлера. Взаимодействие филлеров Neauvia Organic с PMN человека (полиморфонуклеары человека), благодаря своей уникальной пэг-формуле, обеспечивает снижение миграции самого филлера и окислительного метаболизма, а так же снижение уровня mRNA (мРНК) ключевых провоспалительных медиаторов, таких как TNF- α и IL-8.

П. Кубик, В. Грушинский: "Влияние температуры на различные наполнители на основе гиалуроновой кислоты". Академия эстетической и Анти-старения медицины 4/2019; 40-46. Дерматологическая Терапия. 2020; e13388

Предназначены для стимуляции выработки коллагена, коррекции мимических морщин, увеличения объема и изменения тургора тканей лица.



Описание

STIMULATE, STIMULATE MAN, INTENSE, INTENSE MAN, INTENSE FLUX, INTENSE LIPS, INTENSE RHEOLOGY, INTENSE LV

Имплантат представляет собой абсорбируемый, стерильный, апиrogenный, упруго-вязкий, бесцветный, прозрачный, изотонический гель. Имплантат состоит из поперечно-связанного гиалуроната натрия биоферментативного происхождения. В состав имплантата не входят ткани животных, а также производные из тканей животных.

Гиалуронат натрия поперечно связан сшивающим агентом ПЭГ (полиэтиленгликоль).

В препаратах **HYDRO DELUXE, HYDRO DELUXE MAN** применяется гиалуронат натрия без поперечной сшивки.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам, особенно к гиалуронату натрия
- Перенесенные аутоиммунные болезни
- Склонность к развитию гипертрофического рубцевания
- Беременность или кормление грудью
- Склонность к кровотечениям
- Тромболитическая или антикоагулянтная терапия в течение последних 2 недель
- Острые вирусные или бактериальные инфекции или связанные с ними состояния
- Активные воспалительные процессы в местах предполагаемого введения и прилегающих к ним зон
- Возраст до 18 лет

Показания

- Лечение мелких и глубоких морщин
- Увеличение объема и изменение тургора тканей лица

Условия применения

Данные медицинские изделия должны быть использованы в условиях специализированных медицинских учреждений только специалистами с высшим медицинским образованием, прошедшими обучение.



Форма выпуска

Гидрогель в шприцах-картриджах с соединением луер-лок. В упаковку входит шприц, иглы или канюля и инструкция по применению.



Рекомендуемая подготовка

- Провести беседу с пациентом для уточнения состояния его здоровья
- Проинформировать пациента обо всех показаниях и противопоказаниях к применению продукта
- Получить подпись пациента в форме информированного согласия

Процедура применения

- Провести тщательную антисептическую обработку зоны терапии
- Открутить защитный колпачок шприца
- Прикрутить иглу к соединению луер-лок на шприце
- Слегка нажать на поршень, чтобы удалить возможный остаточный воздух из цилиндра шприца.
- После процедуры специалист может провести легкий массаж для более равномерного распределения.
- Возможно назначение противовоспалительного препарата, снимающего отек (возможная физиологическая реакция на любой наполнитель)
- К обрабатываемой поверхности может быть приложен холод для уменьшения воспалительных процессов, которые, как правило, связаны с инъекцией.

Анестезия

В целях избегания любой возможной аллергической реакции в имплантатах NEAUVIA ORGANIC не содержится анестетик.


- Следует оценить использовать ли местную анестезию. В этом случае желательно проводить локальную технику проводниковой анестезии.
- Для пациентов, имеющих в анамнезе аллергию, необходимо оценить, является ли целесообразным использование анестезии.



Будьте осторожны выполняя инъекции в опасных зонах.

В некоторых областях целесообразно использование канюли.

При использовании иглы вблизи кости или в опасной зоне настоятельно рекомендуется проводить аспирационную пробу.

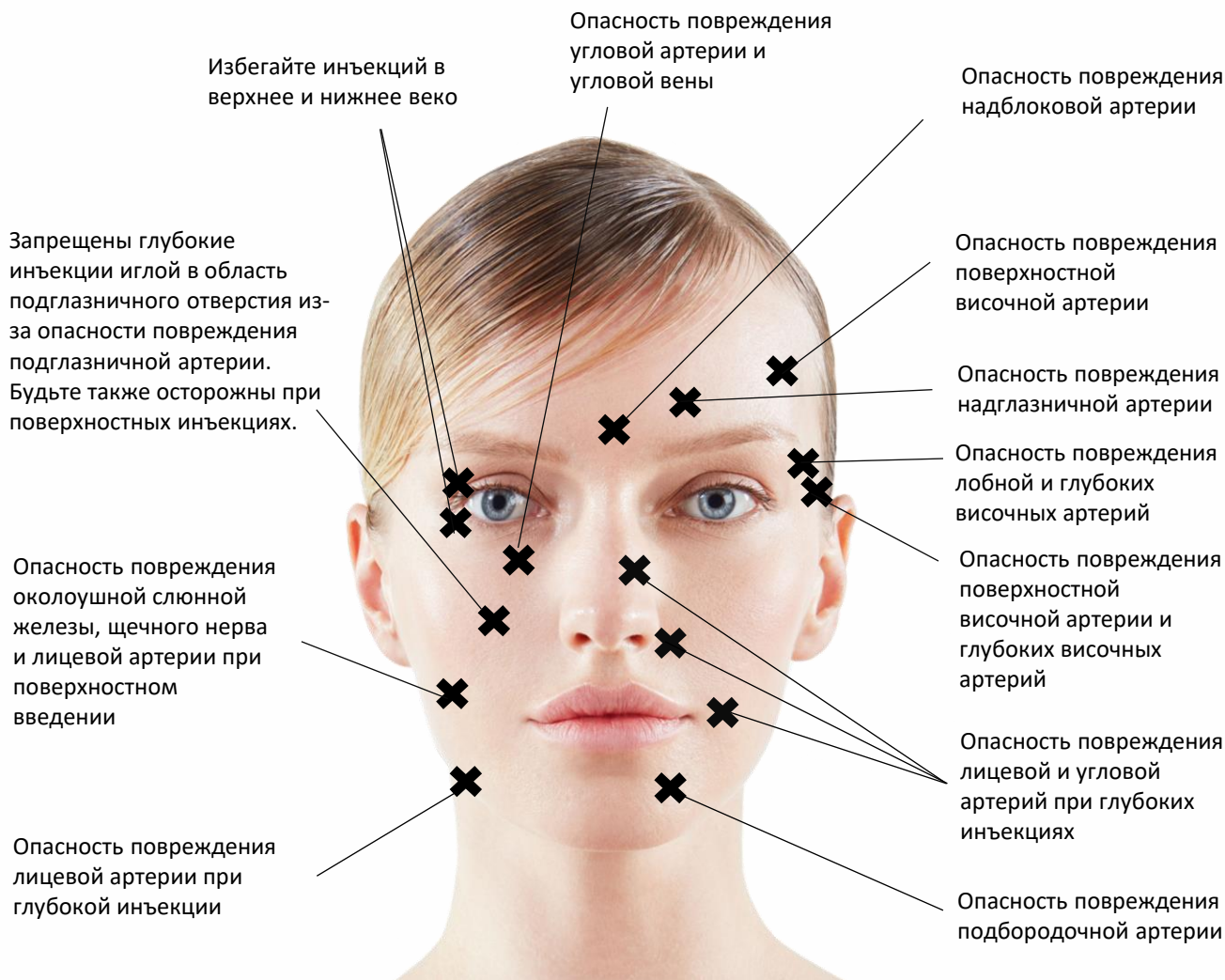

Следует избегать инъекций в пределах 2 см над уровнем костного края глазницы




При виде спереди сбалансированное лицо должно разделяться на три равные горизонтальные линии и на пять равных вертикальных линий

Верхняя треть - участок от линии роста волос до точки гласселлы

Средняя треть - от высочайшей точки гласселлы до подносовой точки

Нижняя треть - между субназальной и нижней точкой подбородка

Идеальные пропорции нижней трети: 1/3 над и 2/3 под линией смыкания губ

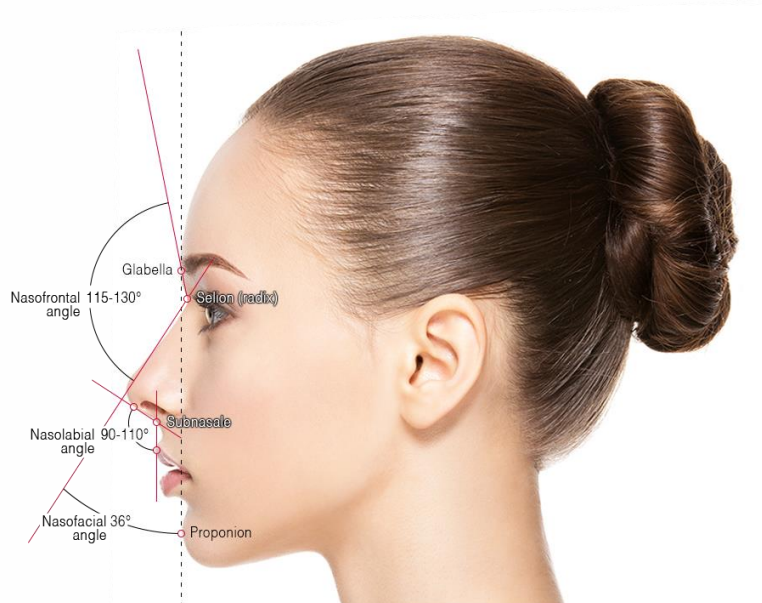

При взгляде сбоку есть определенные лицевые углы, связанные с носом, которые создают идеальный боковой профиль

Нософронтальный угол - в идеале должен быть в пределах 115-130°.


Носолицевой угол - идеал угла составляет 35-40°.

Носогубный угол - идеальный эстетический диапазон должен составлять от 90° до 110° в зависимости от этнической принадлежности и пола.



Линейно-ретроградная техника

Полностью введите иглу вперед без инъекции, вводите препарат при обратном движении иглы.

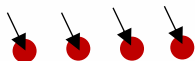


Болюсная техника

Введение точечное. Введите иглу перпендикулярно коже, в глубокие слои кожи - на надкостницу. Для того, чтобы создать болюс, поменяйте угол наклона - от прямого до острого. В каждой точке формируйте болюс препарата необходимого объема.




Папульная техника

Введите точно, близко друг к другу, маленькими нажатиями небольшой объем препарата. Введение интрадермальное и субдермальное.

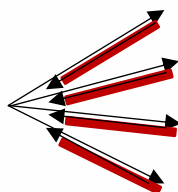


Веерная техника

Введите иглу в одну точку. Вводите препарат при обратном движении иглы, прекращая вводить его до возврата к точке входа, чтобы предотвратить избыток препарата в одной зоне. Почти вынув иглу, измените направление и повторяйте действие необходимое количество раз.

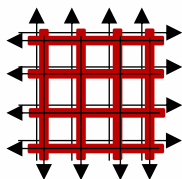

Техника «Сетка»

Вводите препарат линейно-ретроградно. Сделайте пересечение линий под прямым углом.

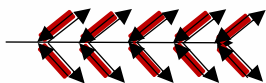

Техника «Папоротник»

Введите иглу на полную длину, при обратном движении вводите препарат маленькими объемами, меняя направление иглы в разные стороны от центральной линии.



Техника «Мелкие стежки»

Выполняйте в линейно-ретроградной технике короткими линиями

Канюля или игла?

Введение препарата канюлей обычно применяется при инъекциях большого объема на надкостницу или подкожно, в отличие от введения препарата иглой. Иглу используют для большей точности, проводя инъекции в поверхностном слое.

Выбор инструмента всегда остается на усмотрение врача.

FLUX



Концентрация ГК	26 мг/мл
Молекула сшивки PEG	xx
СаНА	---
Шприц	1 x 1 мл
Игла/канюля	27G, 30G игла
Продолжительность эффекта	6-9 месяцев
Область применения	коррекция слабовыраженных морщин-линий в области носогубных складок, гласселлы, коррекция височной зоны и периорбиты




Техника введения: линейно-ретроградная, канюльная
Глубина введения: субдермально

RHEOLOGY



Концентрация ГК	22 мг/мл
Молекула сшивки PEG	xx
СаНА	---
Шприц	1 x 1 мл
Игла/канюля	2x27G игла
Продолжительность эффекта	6-9 месяцев
Область применения	коррекция эпидермальных морщин периоральной зоны, восстановление объема губ, восстановление мягких тканей мочки уха и периарикулярной зоны, коррекция гласселлы

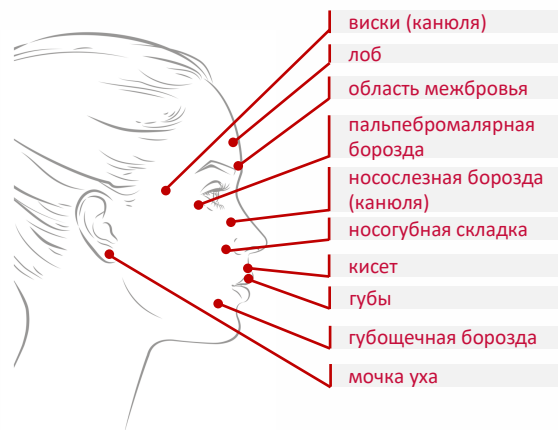


Техника введения: линейно-ретроградная
Глубина введения: субдермально

LIPS



Концентрация ГК	24 мг/мл
Молекула сшивки PEG	xxx
СаНА	---
Шприц	1 x 1 мл
Игла/канюля	2х25G игла
Продолжительность эффекта	8-12 месяцев
Область применения	восполнение объема и моделирование контуров губ, морщины-линии в области кисета и периоральной зоны

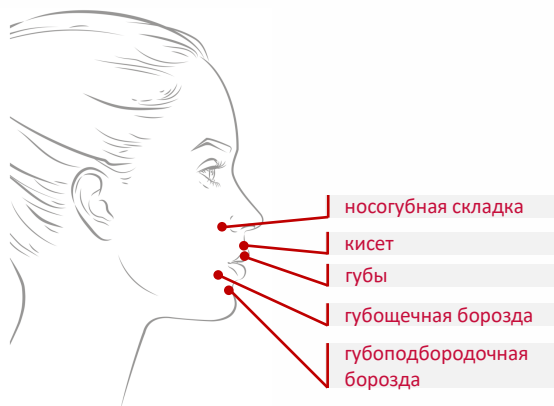

Техника введения: линейно-ретроградная
Глубина введения: субдермально

LV



Концентрация ГК	26 мг/мл
Молекула сшивки PEG	xxxx
СаНА	---
Шприц	1 x 1 мл
Игла/канюля	канюля 22G с троакаром 21G + игла 25G
Продолжительность эффекта	8-12 месяцев
Область применения	коррекция носогубных складок, волюметрическая коррекция мягких тканей средней трети лица, восполнение объема и моделирование контура губ




Техника введения: линейно-ретроградная, канюльная
Глубина введения: субдермально, супрапериостально

INTENSE



Концентрация ГК	28 мг/мл
Молекула сшивки PEG	xxxxxx
СаНА	---
Шприц	1 x 1 мл
Игла/канюля	канюля 22G с троакаром 21G + иглы 25G
Продолжительность эффекта	12-18 месяцев
Область применения	объемное моделирование контуров лица, волюметрическая коррекция верхней, средней и нижней третей лица

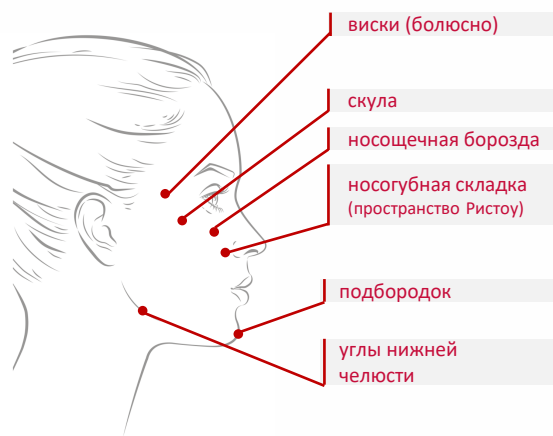

Техника введения: болюсная, канюльная
Глубина введения: субдермально, супрапериостально

INTENSE MAN



Концентрация ГК	28 мг/мл
Молекула сшивки PEG	xxxxxx
СаНА	---
Шприц	1 x 1 мл
Игла/канюля	канюля 22G с троакаром 21G + 2 иглы 25G
Продолжительность эффекта	12-18 месяцев
Область применения	продукт предназначен для мужчин, объемное моделирование контуров лица, волюметрическая коррекция верхней, средней и нижней третей лица



Техника введения: болюсная, канюльная
Глубина введения: субдермально, супрапериостально

Гидрок시아патит кальция (СаНА) в филлерах
STIMULATE

- Способствует увлажнению кожи, повышает ее упругость и эластичность. Необходим для лечения и профилактики гравитационных птозов лица и тела.
- Стимулирует фибробласты к выработке нового коллагена естественным путем. В результате улучшается плотность и эластичность кожи.




Единственный
PEG+СаНА
дермальный
филлер

Победитель AMWC
2024 «ЛУЧШИЙ
ДЕРМАЛЬНЫЙ
ФИЛЛЕР»

STIMULATE



Концентрация ГК	26 мг/мл
Молекула сшивки PEG	xxx
СаНА	1% СаНА
Шприц	1 x 1 мл
Игла/канюля	канюля 22G с троакаром 21G + 2 иглы 25G
Продолжительность эффекта	12-18 месяцев
Область применения	восстановление объема и качества тканей путем стимуляции синтеза коллагена в средней и нижней трети лица, зоне кистей рук

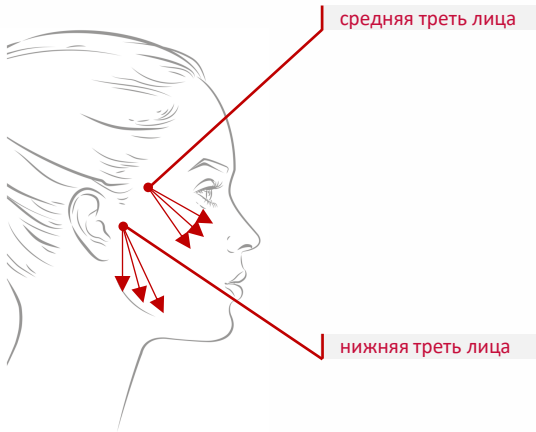


Техника введения: канюльная
Глубина введения: субдермально

STIMULATE
MAN



Концентрация ГК	28 мг/мл
Молекула сшивки PEG	xxx
СаНА	1% СаНА
Шприц	1 x 1 мл
Игла/канюля	канюля 22G с троакаром 21G + 2 иглы 25G
Продолжительность эффекта	12-18 месяцев
Область применения	продукт предназначен для мужчин, восстановление объема и качества тканей путем стимуляции синтеза коллагена в средней и нижней трети лица, периоральной области, зоне кистей рук

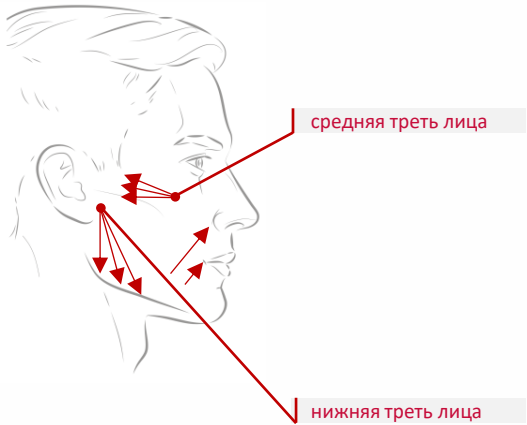

Техника введения: канюльная
Глубина введения: субдермально

HYDRO DELUXE, HYDRO DELUXE MAN

БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ с СаНА

HYDRO DELUXE содержит 18 мг/мл чистой гиалуроновой кислоты, обогащенной 0,01% гидроксипатита кальция.

Этот уникальный состав активирует и поддерживает естественные процессы выработки коллагена и эластина, благодаря чему кожа становится более плотной и упругой.

Профилактика увядания кожи
Возрастные изменения кожи (морщины, потеря тонуса, гравитационный птоз)
Подготовка к пластическим операциям
Поддержание косметического эффекта от применения филлеров на основе ГК
Реабилитация кожи в послеоперационном периоде
Восстановление кожи после срединных и глубоких пилингов, лазерных шлифровок
Фотостарение, стрессы, курение
Обезвоженная, «усталая» кожа

HYDRO DELUXE



Концентрация ГК	18 мг/мл
Молекула сшивки PEG	---
СаНА	0,01% СаНА
Шприц	2 x 1 мл, 2 x 2,5 мл
Игла/канюля	2 x 30G игла
Продолжительность эффекта	4-6 месяцев
Область применения	увлажнение, ревитализация кожи лица, шеи, зоны декольте и тела, стимуляция синтеза коллагена




Техника введения: папулярная, микропапулярная, линейно-ретроградная («сетка»)
Глубина введения: эпидермально, дермально

HYDRO DELUXE MAN



Концентрация ГК	18 мг/мл
Молекула сшивки PEG	---
СаНА	0,01% СаНА
Шприц	2 x 2,5 мл
Игла/канюля	2 x 30G игла
Продолжительность эффекта	4-6 месяцев
Область применения	увлажнение, ревитализация кожи лица, шеи, зоны декольте и тела, стимуляция синтеза коллагена

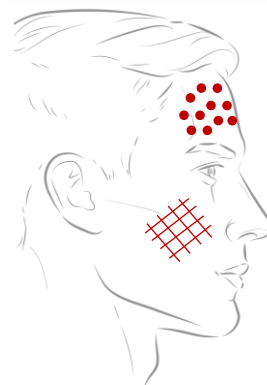


Техника введения: папулярная, микропапулярная, линейно-ретроградная («сетка»)
Глубина введения: эпидермально, дермально

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ МОРФОТИП

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Основные проявления

- выраженная морщинистость в области лба, межбровья, периорбитальной и периоральной областей, щек;
- сухая, истонченная кожа (пергаментный вид);
- овал лица деформирован незначительно (как правило);
- признаков отечности нет.

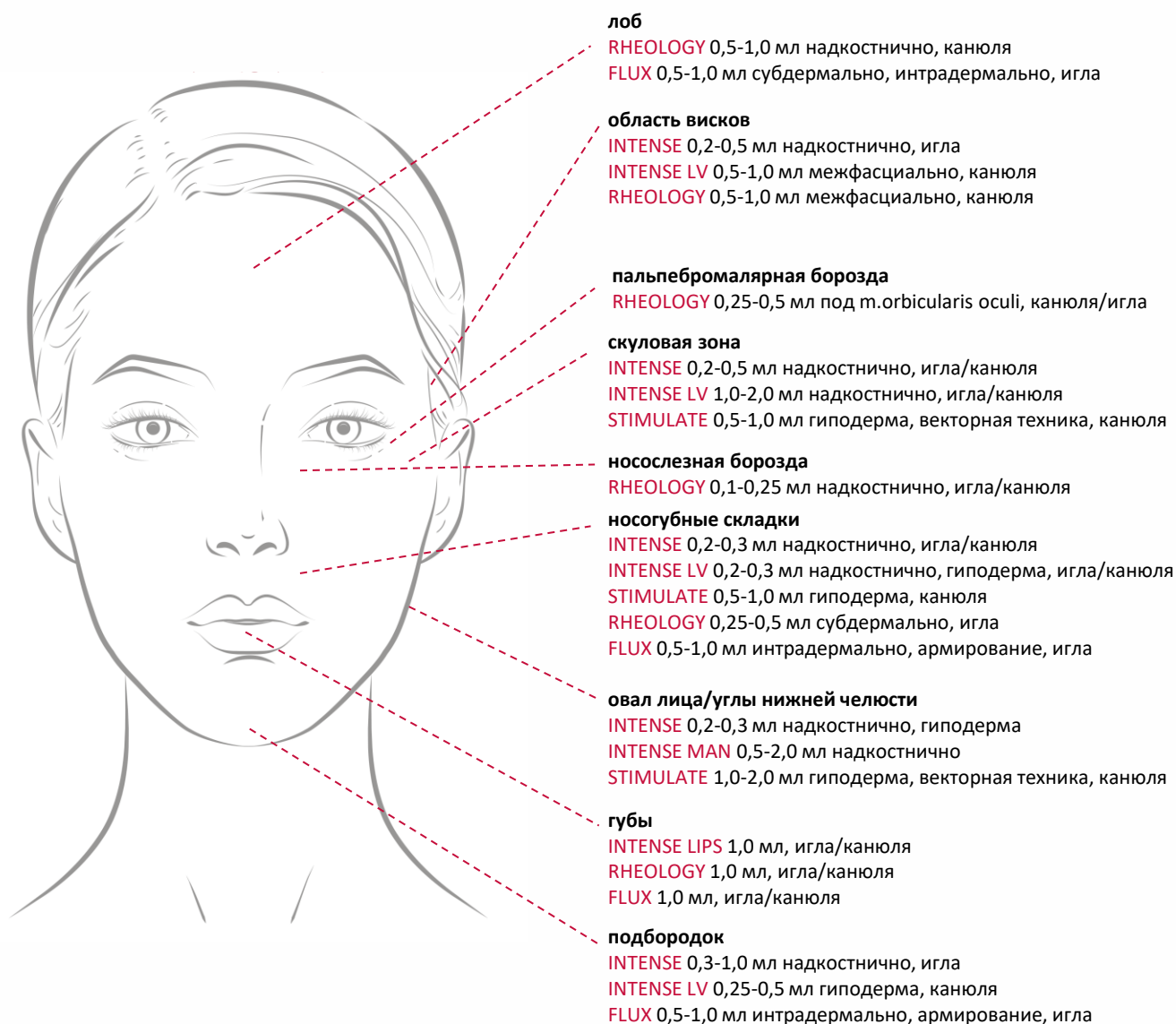


Примечание

Надкостничное введение предполагает предварительное взятие аспирационной пробы на «пустую иглу»

ВАРИАНТ КОРРЕКЦИИ

Препараты: **FLUX**+**STIMULATE**

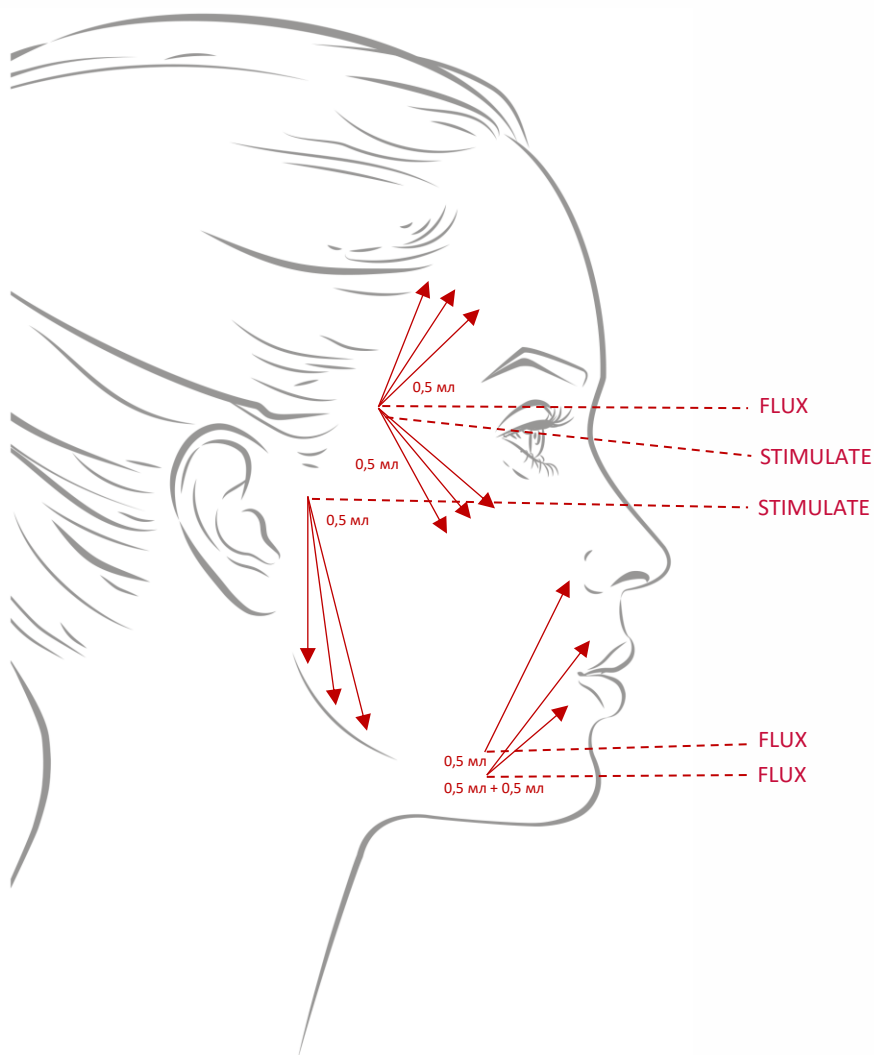

Препарат: **FLUX**

Техника: веерная

Объем: 1,0-2,0 мл

Глубина: субдермально, интрадермально, пжк

Канюля: 25G /50 mm или 22G x 50mm

Игла: 27G/13мм или 30G/13мм

Препарат: **STIMULATE**

Техника: линейно-ретроградная


Объем: 1,0-2,0 мл

Глубина: пжк

Канюля: 22G/50 мм

Основные проявления

- брыли;
- провисание подбородка и кожи шеи;
- мешки под глазами;
- носогубные складки 3-4-й степени;
- пористая кожа
- признаки фотостарения кожи легкой или средней степени выраженности (зависит от фототипа);
- кожа чувствительная, особенно при наличии сосудистого компонента.

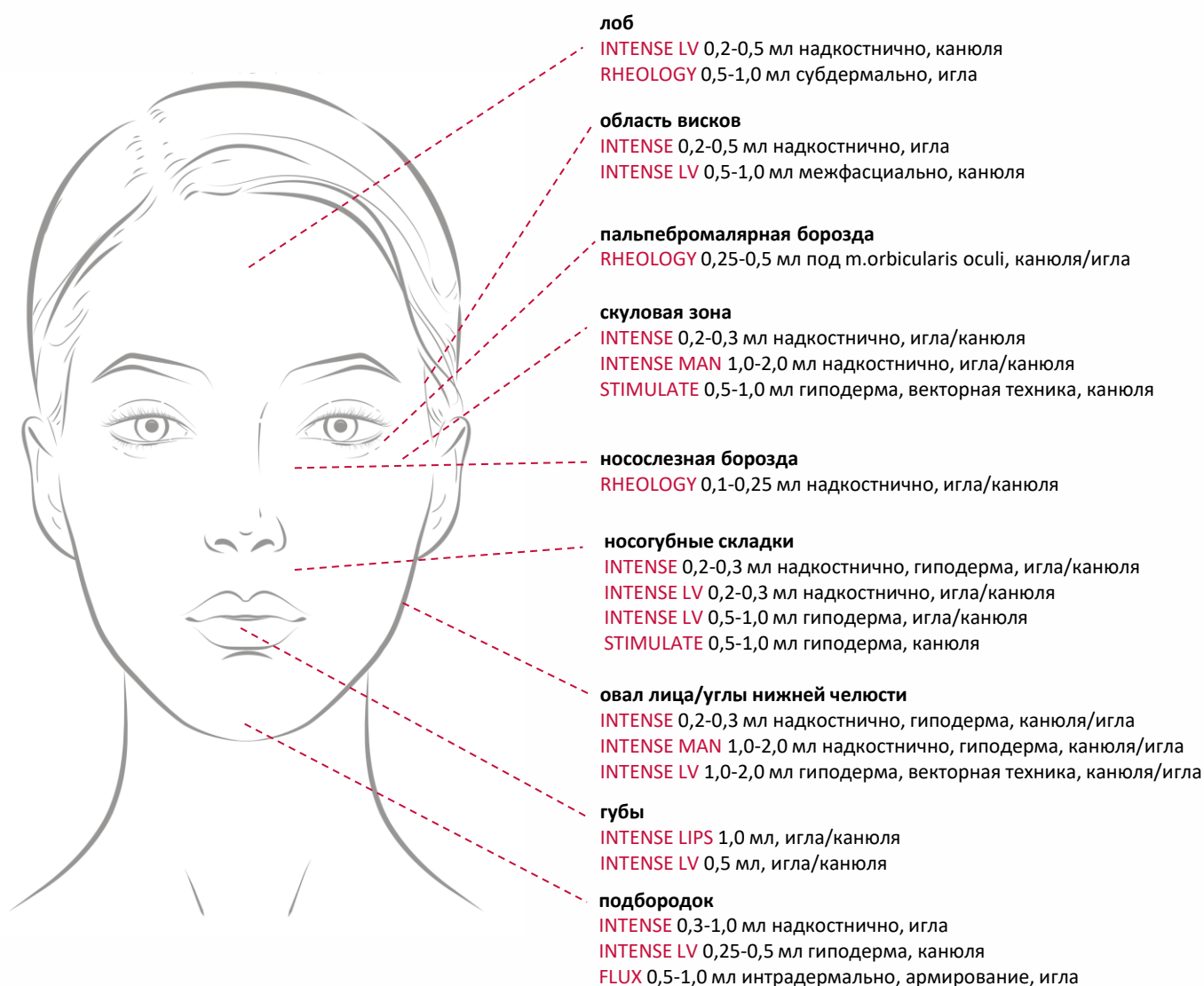


Примечание

Надкостничное введение предполагает предварительное взятие аспирационной пробы на «пустую иглу»

ВАРИАНТ КОРРЕКЦИИ

Препараты: **INTENSE+INTENSE LV**

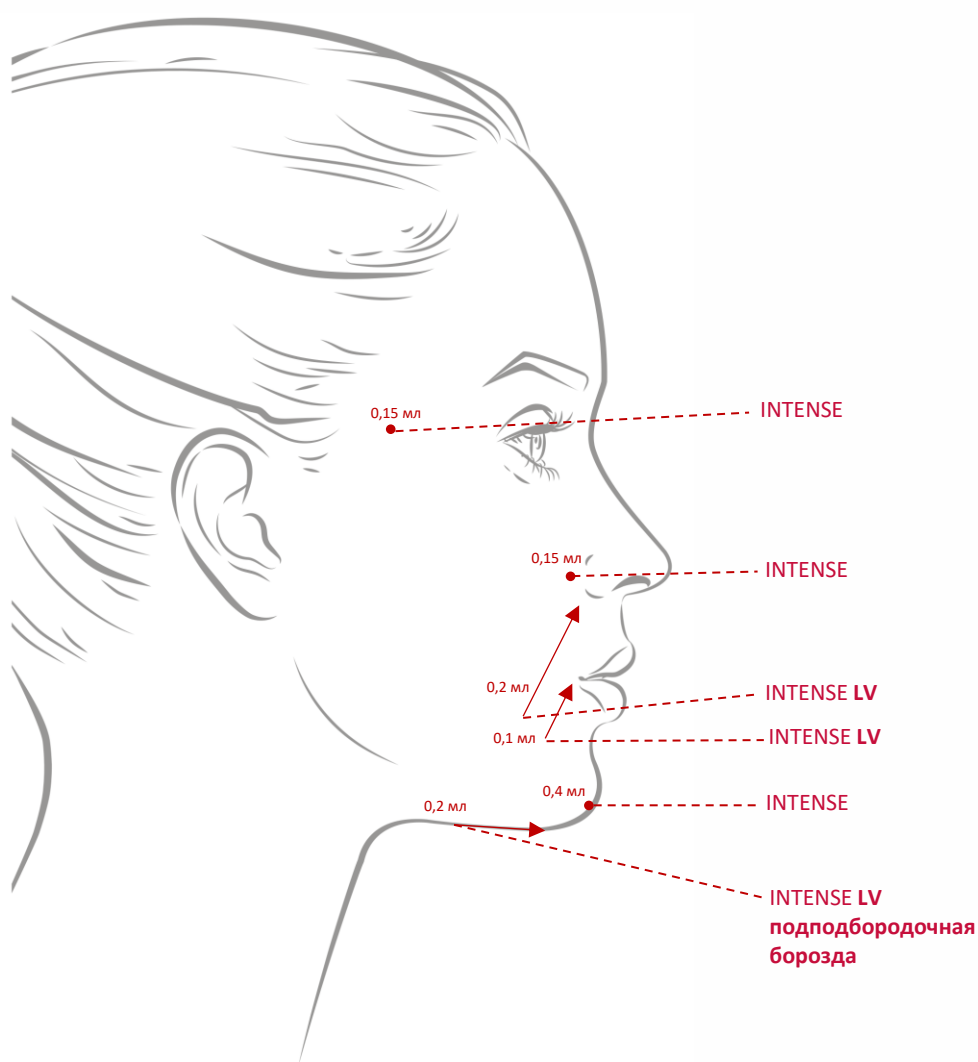


Препарат: **INTENSE**
Техника: болюсная
Объем: 1,0 мл
Глубина: наднадкостнично
Игла: 25G/16мм

Препарат: **INTENSE LV**
Техника: линейно-ретроградная
Объем: 1,0 мл
Глубина: пжк
Канюля: 22G/50 мм

ВАРИАНТ КОРРЕКЦИИ

Препараты: **INTENSE LV+RHEOLOGY**

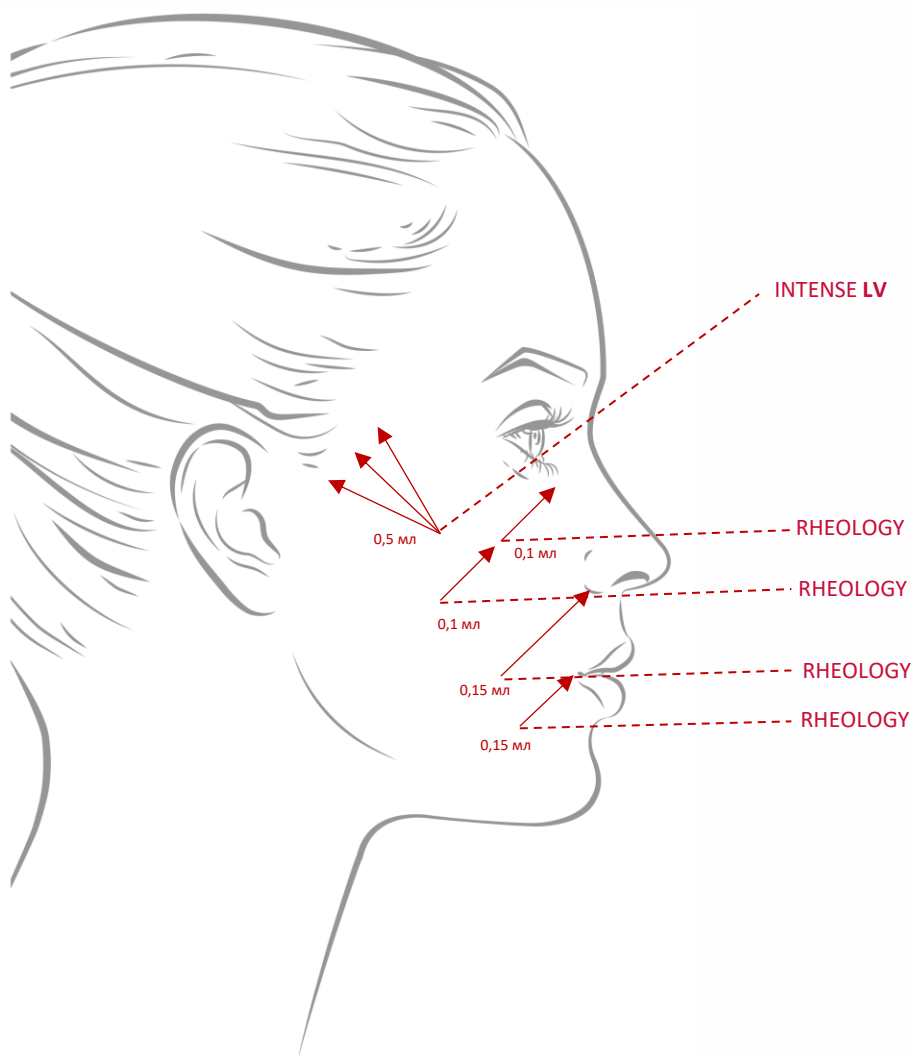

Препарат: **RHEOLOGY**

Техника: линейно-ретроградная

Объем: 1,0 мл

Глубина: субдермально, иглой, в область
носогубной складки, губощечной борозды;
под круговую мышцу глаза орбиты

Канюля: 25G /50 mm или 22G x 50mm

Игла: 27G/13mm


Препарат: **INTENSE LV**

Техника: веерная

Объем: 1,0 мл

Глубина: глубокое предскуловое
пространство

Канюля: 22G/50 mm

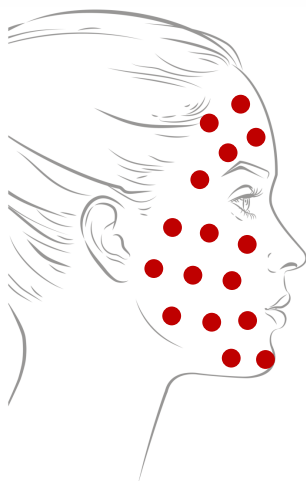

Лицо

Препарат: **HYDRO DELUXE**


Объем: 2,5 мл

Техника: папульная, микропапульная

Игла: 30G/12мм или 32G/12мм или 32/4мм

Глубина: интрадермально

Курс: 3 процедуры с интервалом 14 дней

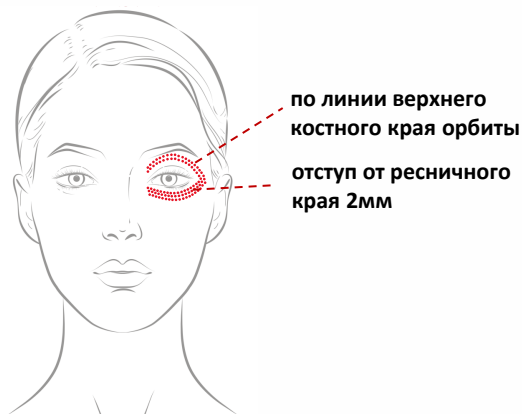

по линии верхнего
костного края орбиты

отступ от ресничного
края 2мм

Периорбитальная область

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Техника: микропапульная (диаметр папул до 1мм)

Глубина: интрадермально на глубину 1-2 мм,
расстояние между вколами 4-5 мм


Игла: 32G/4 мм

Объем: 1 мл

Курс: 3-4 процедуры с интервалом 2 недели

Для повышения контроля введения препарата срез иглы
должен быть направлен вверх.

Несоблюдение рекомендаций может привести к
выраженному отеку этой зоны лица.

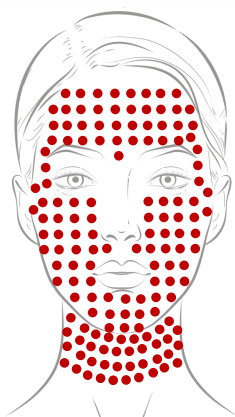

Лицо и шея

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Объем: 2,5 мл

Техника: папульная, микропапульная,
микробугорки


*Лицо - вводите иглу под углом 45° к
поверхности кожи, глубина 2-4 мм,
интервал 0,8-1мм*

*Шея - вводите иглу под углом 30° к
поверхности кожи, глубина 1-2 мм,
интервал 0,8-1мм*

Игла: 30G/12мм или 32G/12мм или 32/4мм

Глубина: интрадермально

Курс: 3 процедуры с интервалом 14 дней

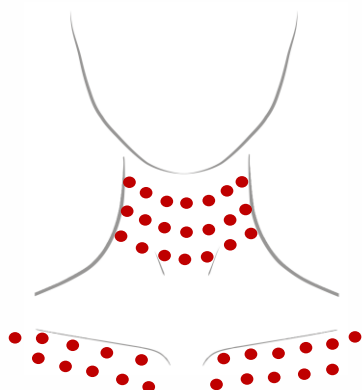

Шея и декольте

точечное введение


Препарат: **HYDRO DELUXE**

Техника: папулярная,
микрокапли

Игла: 30G

Объем: 2,5 мл

Курс: 3-4 процедуры с
интервалом в 2 недели

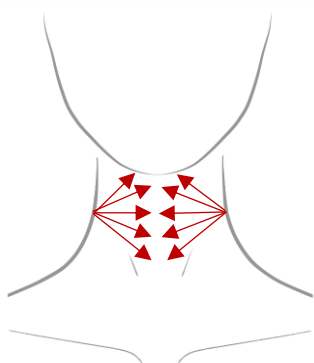

Шея

линейное введение

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Техника: линейно-
ретроградная, веерная

Канюля: 27-30G


Объем: 2,5 мл

Курс: 3-4 процедуры с
интервалом в 2 недели

Примечание

Папулы видны в течение 2-3 дней, если
используется техника микрокапель;

1 день, если линейно-ретроградная

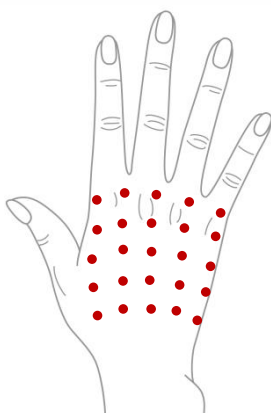

Кисти рук

Препарат: **HYDRO DELUXE**


Техника: папулярная

Глубина: интрадермально

Игла: 30G

Объем: 2,5 мл

Курс: 3-4 процедуры с
интервалом в 2 недели

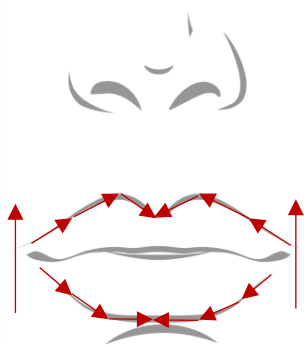

ЧЁТКИЙ КОНТУР

Моделирование контура губ

Препарат: **INTENSE LV**

Техника: линейная

Объем: 0,5 мл

Глубина: субдермально

Игла



RUSSIAN LIPS

Восполнение объёма и моделирование контура губ


Препарат: **INTENSE LIPS**

Техника: линейно-веерная

Объем: 1,0 мл

Глубина: субдермально

Игла/Канюля

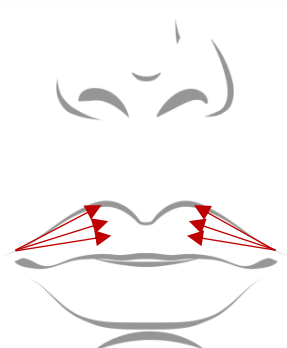

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Коррекция объёма губ


Препарат: **INTENSE RHEOLOGY**

Техника: канюльная

Объем: 1,0 мл

Глубина: субдермально, пжк

Канюля: 25G x 50 mm или 22G x 50mm

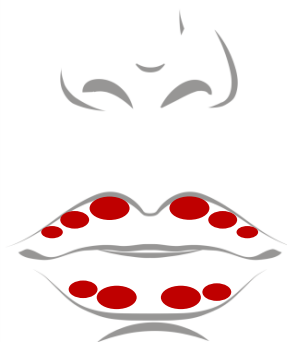

ЭФФЕКТ «ЗАЦЕЛОВАННЫХ ГУБ»

Лёгкий объём и увлажнение

Препарат: **INTENSE FLUX**

Техника: болюсная


Объем: 1,0 мл

Глубина: пжк

Игла

Новый подход к изменению формы и увеличению объема губ

LATIN LIPS – гибридная техника, разработанная для губ. Выбор филлера для такой динамичной зоны, как губы, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих успех процедуры.

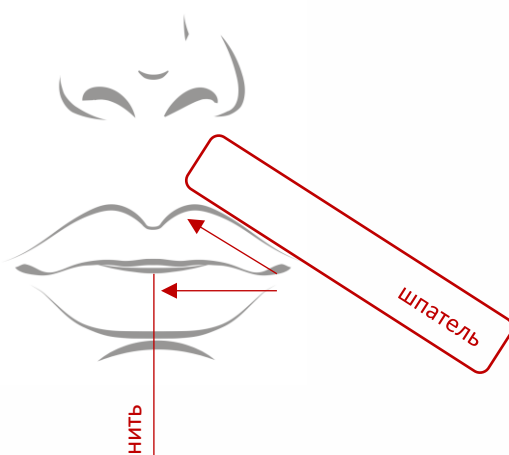

LATIN LIPS

увеличение объема и улучшение
формы и профиля губ

Препарат: **INTENSE LIPS**

Объем: 1,0 мл

Точка входа:

игла 25G/27 мм, под углом 90°
канюля 27G/40 мм, под углом 90°
с использованием техники гольф-
флажка на глубину 0,05 см

Техника LATIN LIPS

Нижняя губа:

0,06 мл в нижней левой центральной задней части,
0,03 мл в нижней левой медиальной передней части,
0,01 мл в нижней левой боковой.

Верхняя губа:

0,1 мл в верхней левой центральной задней части,
0,04 мл в глубокой медиальной верхней левой части,
0,01 мл в верхней левой боковой части.

Техника «сэндвич», используемая для наложения в зависимости от желаемого объема и толщины. Депрессоры языка используются для защиты границ губ во время инъекции.

Точечное введение

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Техника: папульная, микрокапли

Игла: 30G

Объем: 2,5 мл

Курс: 3-4 процедуры с интервалом в 2 недели

Линейное введение

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Техника: линейно-ретроградная, веерная

Канюля: 27-30G


Объем: 2,5 мл

Курс: 3-4 процедуры с интервалом в 2 недели


Примечание

Папулы видны в течение 2-3 дней, если используется техника микрокапель;

1 день, если линейно-ретроградная

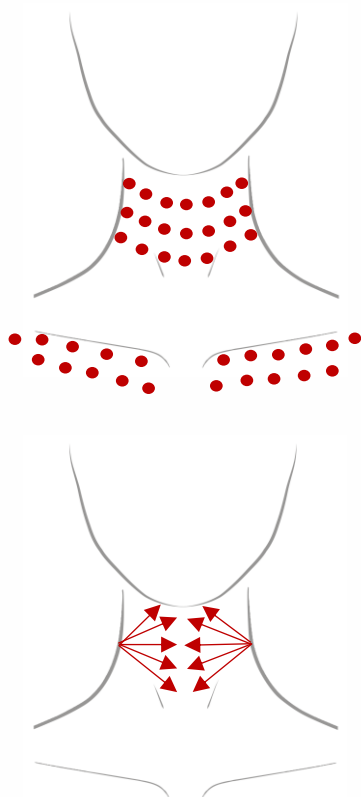

КИСТИ РУК

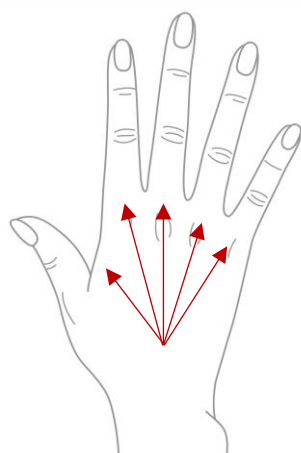

Препарат: **STIMULATE**

Техника: канюльная, веерная

Глубина: пжк


Канюля: 22G

Объем: 1-2 мл

Курс: 3-4 процедуры с интервалом в 2 недели

Примечание

Минимальный риск повреждения нервов и кровеносных сосудов

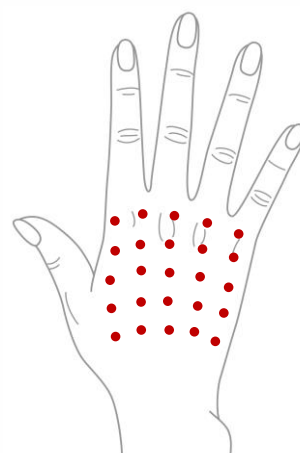

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Техника: папульная

Глубина: интрадермально

Игла: 30G


Объем: 2,5 мл

Курс: 3-4 процедуры с интервалом в 2 недели

Любые процедуры препаратами NEAUVIA ORGANIC возможно сочетать с биоревитализацией препаратом HYDRO DELUXE

Stimulate & Lift

STIMULATE + HYDRO DELUXE

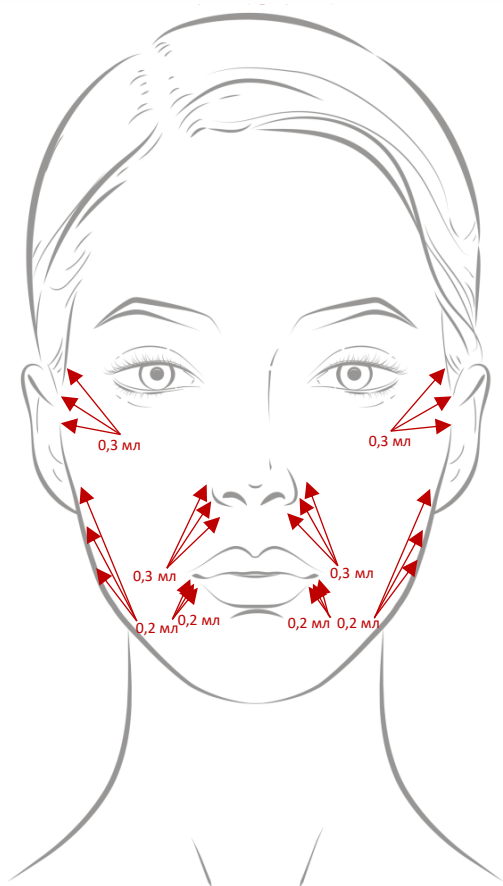

1 этап


Препарат: **STIMULATE**

Объем: 2 мл на обе стороны лица

Техника: линейно-ретроградная, веерная

Канюля: 22G

Глубина: пжк

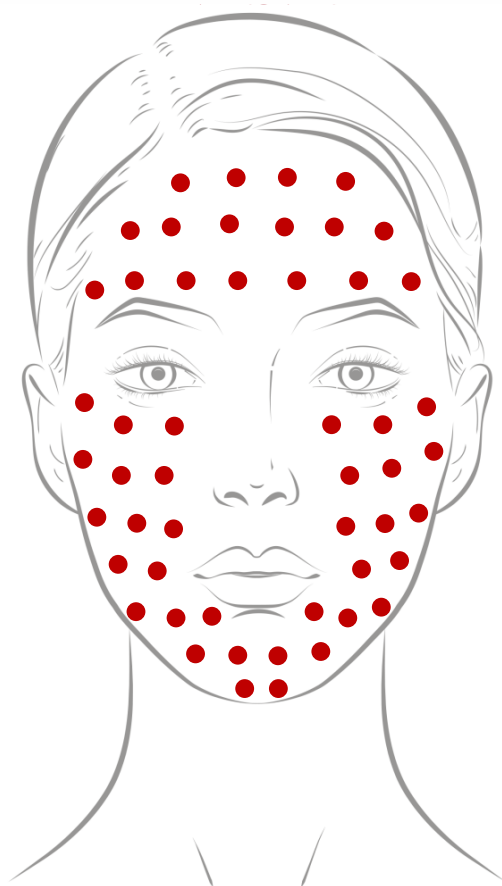

2 этап

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Объем: 2,5 мл

Техника: папулярная, микропапулярная, микроболусная

Игла: 30G

Глубина: интрадермально


Курс: 3 процедуры с интервалом 4 недели

Видимый эффект от процедуры после прохождения полной программы курса

- длительное увлажнение и сияние кожи;
- улучшение тургора кожи;
- видимое улучшение упругости кожи;
- Видимый лифтинг-эффект овала лица.

Лифтинг-эффект

INTENSE + HYDRO DELUXE

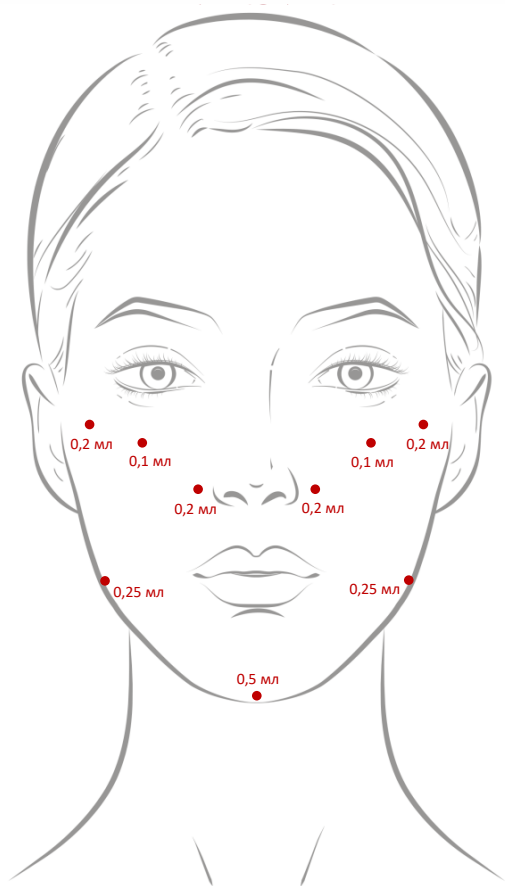


1 этап

Препарат: **INTENSE**

Объем: 2 мл на обе стороны лица

Техника: болюсная

Глубина: наднадкостнично

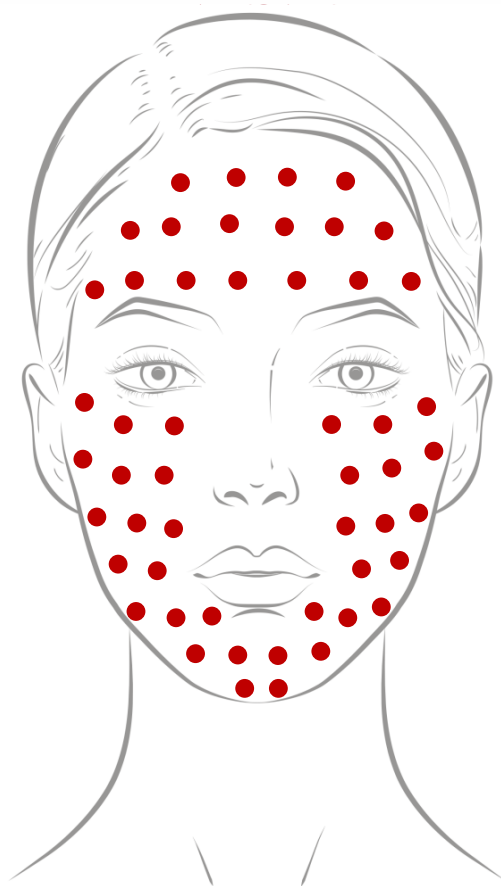

2 этап

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Объем: 2,5 мл


Техника: папульная, микропапульная, микроболюсная

Глубина: интрадермально

Курс: 3 процедуры с интервалом
14-28 дней

Гладкая шея

FLUX + HYDRO DELUXE

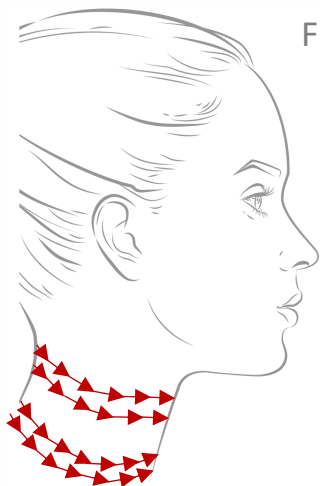


1 этап

Препарат: **FLUX**

Объем: 1-2 мл

Техника: линейно-ретроградная

Глубина: субдермально

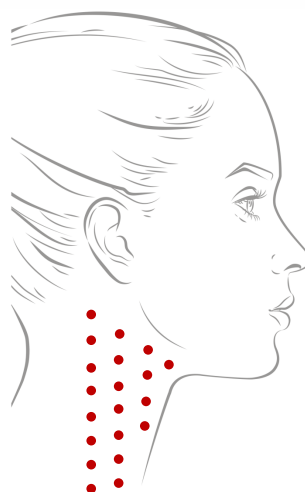

2 этап

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Объем: 2,5 мл


Техника: папулярная

Глубина: интрадермально

Курс: 3 процедуры с интервалом 14 дней

Свежий взгляд

RHEOLOGY + HYDRO DELUXE

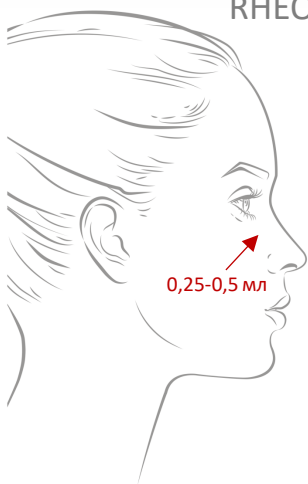

1 этап

Препарат: **RHEOLOGY**

Объем: 0,25-0,5 мл

Техника 1: линейно-ретроградная


Канюля: 22G/50 мм или 22G/50 мм

Глубина: под круговую мышцу глаза

Техника 2: микроболюсно

Игла: 27G/13 мм

Глубина: наднадкостнично

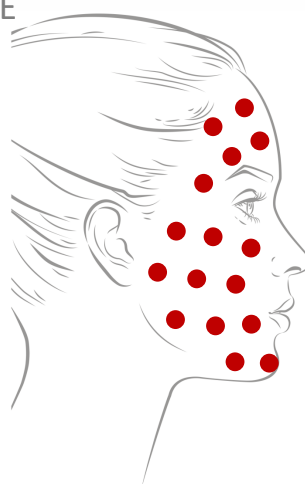

2 этап

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Объем: 2,5 мл

Техника: папулярная, микропапулярная


Игла: 30G/12мм или 32G/12мм или 32/4мм

Глубина: интрадермально

Курс: 3 процедуры с интервалом 14 дней

Идеальный лоб

FLUX + HYDRO DELUXE

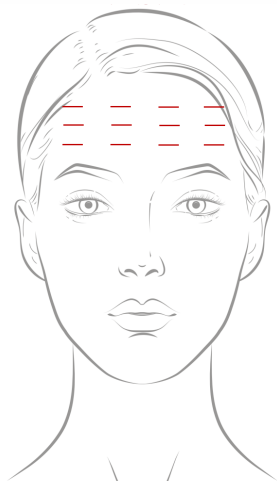


1 этап

Препарат: **FLUX**

Объем: 1мл

Техника: «мелкие стежки» линейно-ретроградно (30G/12мм или 27G/12мм)

Глубина: интрадермально

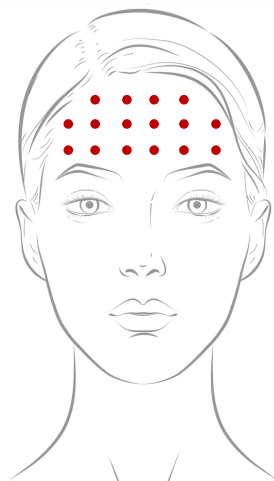

2 этап

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Объем: 1мл


Техника: папулярная

Глубина: интрадермально

Курс: 3 процедуры с интервалом в 2 недели

Лайт (базовая процедура)

FLUX

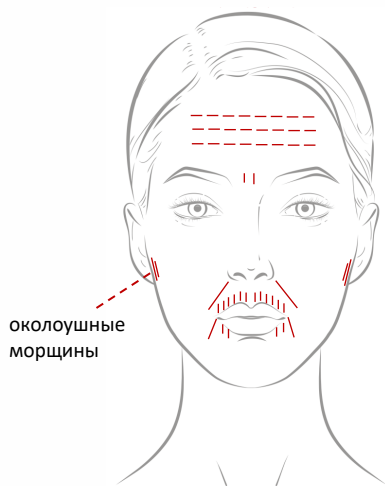

околоушные
морщины

Препарат: **FLUX**

Объем: 2-3 мл


Техника: «мелкие стежки» линейно-ретроградно

Игла: 30G/12мм или 27G/13мм

Глубина: интрадермально, субдермально

Медиум (мелкие морщинки)

RHEOLOGY

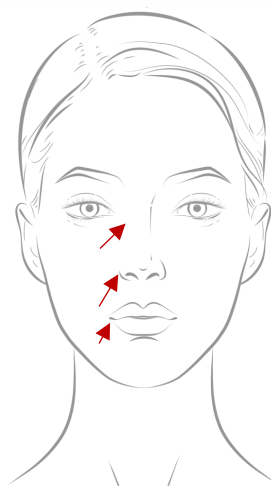

Препарат: **RHEOLOGY**

Объем: 1-2 мл

Техника: линейно-ретроградная


Игла: 27G/13 мм

Канюля: 22G/50 мм или 25G/50 мм

Глубина: субдермально или под круговую мышцу глаза

Комплекс (первые признаки старения)

INTENSE + STIMULATE + LIPS

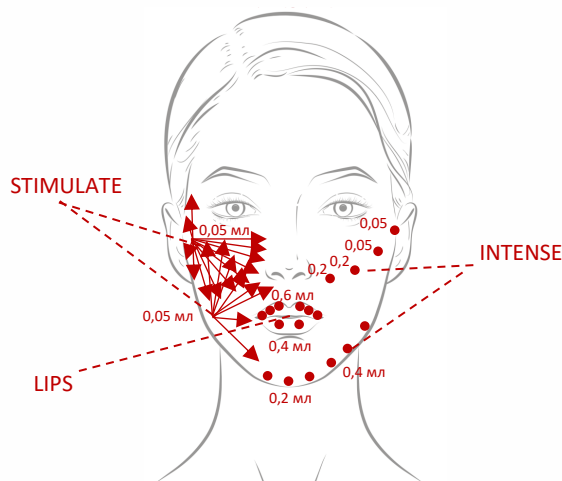

Препарат: **INTENSE**

Объем: 2 мл

Техника: болюсная

Препарат: **STIMULATE**

Объем: 2 мл


Техника: канюльная, веерная

Препарат: **INTENSE LIPS**

Объем: 1 мл

Комплекс + (усталый вид)

INTENSE + STIMULATE + LIPS + HYDRO DELUXE

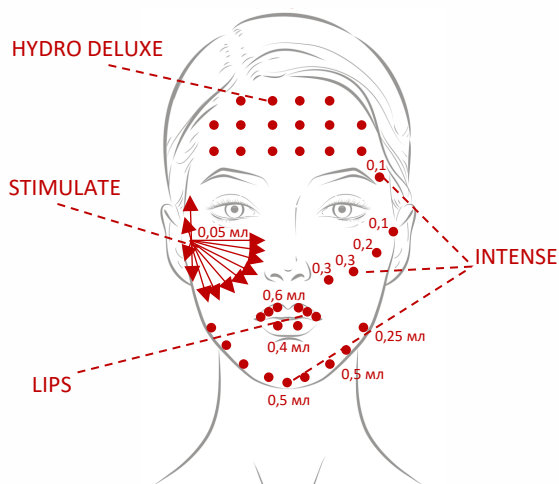

Препарат: **INTENSE**

Объем: 2 мл

Техника: болюсная

Препарат: **STIMULATE**

Объем: 2 мл


Техника: канюльная, веерная


Препарат: **LIPS**


Объем: 1 мл

Препарат: **HYDRO DELUXE**

Объем: 2,5 мл

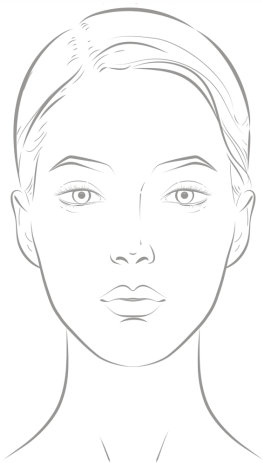

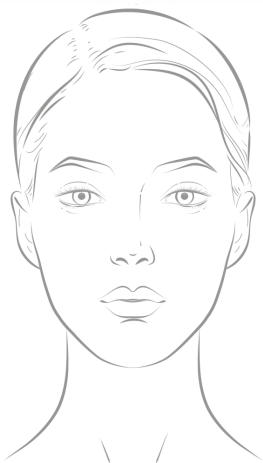

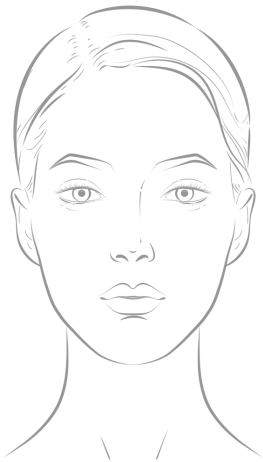

*Благодарим за содействие в создании материала
врача-косметолога, дерматолога, эксперта по инъекционным методикам
Шарманову А.С.*

Материалы и исследования:

1. Инструкция по применению медицинского изделия «Имплантат интрадермальный Ньювиа Органик (NEAUVIA ORGANIC)»
2. Новая косметология. Возрастная и гендерная косметология. Под общей редакцией Эрнандес Е. И., 2017г.
3. Марино Ф., Козентино М., Леньяро М., Луини А., Сигова Дж., Мокки Р., Лотти Т. и Зербинати Н. Иммунный профиль сшитого полиэтиленгликолем гидрогеля гиалуроновой кислоты: оценка *in vitro* на полиморфноядерных лейкоцитах человека. Дерматологическая терапия. 2020; e13388. <https://doi.org/10.1111/dth.1338>
4. Чон ЧХ, Ким Д.Х., Юн Дж.Х., Квон ХК, Шин Д.М., Сон Х., Ли К.Х., Чхве Би, Ким ЭС, Кан Дж.Х., Ким ЭК и Хан С.Г. Оценка токсичности сшивающих агентов, используемых в дермальном филлере на основе гиалуроновой кислоты, *in vitro*. Токсикология *in Vitro*, том 70, 2021, 105034, ISSN 0887-2333. <https://doi.org/10.1016/j.tiv.2020.105034> Клинические данные в личном деле.
5. Зербинати Н., Лотти Т., Монтичелли Д., Раусо Р., Гонсалес-Исаза П., Д'Эсте Е., Каллигаро А., Сомматис С., Маккарио С., Мокки Р., Лотти Дж., Воллина У., Чернев Г. и Франса К. Оценка биобезопасности ПЭГ гиалуроновой кислоты, сшитой с микромолекулами гидроксиапатита кальция в низкой концентрации, *in vitro*. В открытом доступе *Maced J Med Sci*. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.044>
6. Зербинати Н., Лотти Т., Монтичелли Д., Мартина В., Чиполла Г., Д'Эсте Е., Каллигаро А., Мокки Р., Маккарио С., Сомматис С., Лотти Дж., Воллина У., Чернев Г. и Франса К. Оценка чувствительности ПЭГ гиалуроновой кислоты, сшитой с гиалуронидазой яичек крупного рогатого скота, *in vitro*. В открытом доступе *Maced J M*
7. Зербинати Н., Капилло М.К., Сомматис С., Маккарио С., Алончи Г., Раусо Р., Галадари Х., Гуида С. и Мокки Р. Реологические исследования как инструмент оценки физико-химической стабильности дермального филлера на основе гиалуроновой кислоты, сшитого с Диглицидиловым эфиром полиэтиленгликоля. *Гели* 2022, 8, 264. <https://doi.org/10.3390/gels8050264>
8. Зербинати Н., Сомматис С., Маккарио С., Капилло М.К., Гримальди Г., Алончи Г., Протасони М., Раусо Р. и Мокки Р. К физико-химическим и реологическим характеристикам различных дермальных наполнителей на основе сшитого полиэтилена Диглицидиловый эфир гликоля. *Полимеры* 2021, 13, 948. <https://doi.org/10.3390/polym13060948>
9. Зербинати Н., Д'Эсте Е., Де Сильвестри А., Зуллино М., Раббози Г., Гуида С., Кубик П., Стабиле Г., Мокки Р., Барлускони С. и др. Эффективность филлера на основе пегилированной гиалуроновой кислоты, обогащенного гидроксиапатитом кальция: 24-недельное открытое одноцентровое исследование, проведенное после выхода на рынок. *Биоматериал*. 2023, 14, 345. <https://doi.org/10.3390/jfb14070345>.

NEAUVIATM

ORGANIC

MADE IN ITALY



neauvia.ru

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Фирма «САЛЮТА»
г. Москва, 123001, Трехпрудный пер., д. 11/13, стр. 5
+7 495 120 03 88 | info@neauvia.ru